



USER MANUAL – EN

**IN 26785 Elektromos első kerék kerekesszékhez
inSPORTline Oppatia (T08)**



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
TERMÉK LEÍRÁS	3
KIJELZŐ	4
SPECIFIKÁCIÓK	4
MOTOR POZÍCIÓK	4
ÖSSZESZERELÉS	5
AKKUMULÁTOR	8
KÖRNYEZETVÉDELEM	10

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végezzen termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Kizárólag arra a célra használja, amelyre készült.
- Nem alkalmas tömegközlekedésben való használatra, ha nem biztos benne, forduljon a helyi hatóságokhoz.
- Ne használja a készüléket, ha alkohol, gyógyszer vagy kábítószer hatása alatt áll.
- Ellenőrizze orvosával a jogosultságát a használatra.

TERMÉK LEÍRÁS



1. Fékkar

2. Első lámpa

3. Kormányvilágítás

4. Akkumulátorzár

5. Első lámpa 2

6. Tápkábel

7. Összekötő keret

8. Duda

9. Elektronikus fék


10. Gázpedál

11. Indítógomb

12. Töltőport

13. USB-port

KIJELZŐ

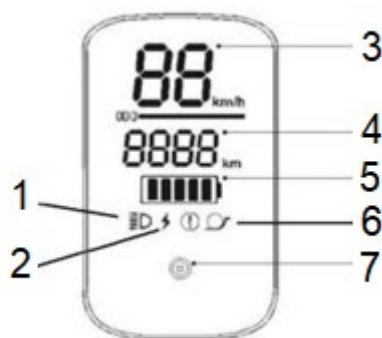

1. Lámpák

2. Sebesség mód

3. Gyors mód

4. Raid

5. Akkumulátor állapota


6. Lassú mód

7. LED gomb

SPECIFIKÁCIÓK

Váz	6061 alumínium
Motor	36 V-os, 350 W-os szénkefe nélküli motor
Vezérlőegység	Intelligens vezérlés
Akkumulátor	36 V-os, 7,8 Ah-s lítium akkumulátor LG cellával
Töltő	AC 100 V- 240 V, 2 amperes, intelligens töltő
Kijelző	LED érintőképernyő
Világítás	Első LED lámpák
Fékek	Dobfékek
Kerekek	INNOVA 8½ *2.5
Max. sebesség	1: 6 km/h, 2: 15 km/h, 3: 20 km/h, hátramenet: 4 km/h
Hatótávolság	25 km
Töltési idő	2-4 óra
Súlykorlátozás	115 kg

MOTOR POZÍCIÓK

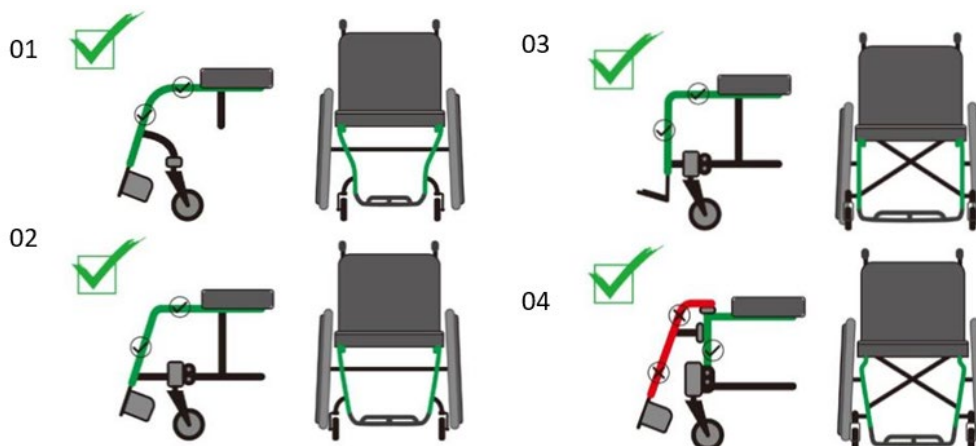

ÖSSZESZERELÉS

LÁBTARTÓ

A villáskulcs segítségével lazítsa meg a csavarokat, igazítsa a furatokat, és rögzítse a lábtartót a csavarokkal.







Igazítsa a fogantyúkat a furatokhoz.




A TARTÓ SZÉLESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1. Helyezze be az alátétet a csavarba, majd rögzítse a fogantyút a csavarhoz.
2. Lazítsa meg az anyákat mindkét oldalon, és állítsa be egyenletesen a szélességet.
3. Állítsa be a konzolok szögét.

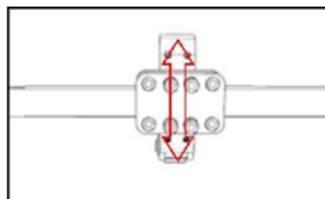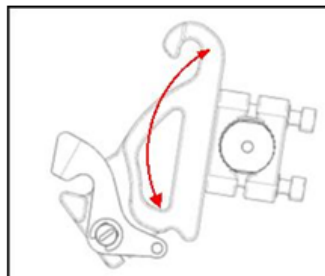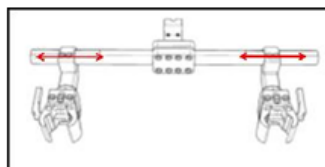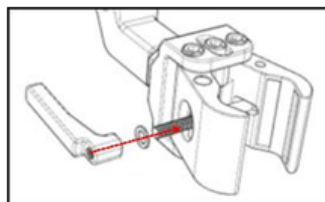


A KONZOL RÖGZÍTÉSE

Lazítsa meg a megjelölt csavarokat, és állítsa be egyenletesen a tartó szélességét.

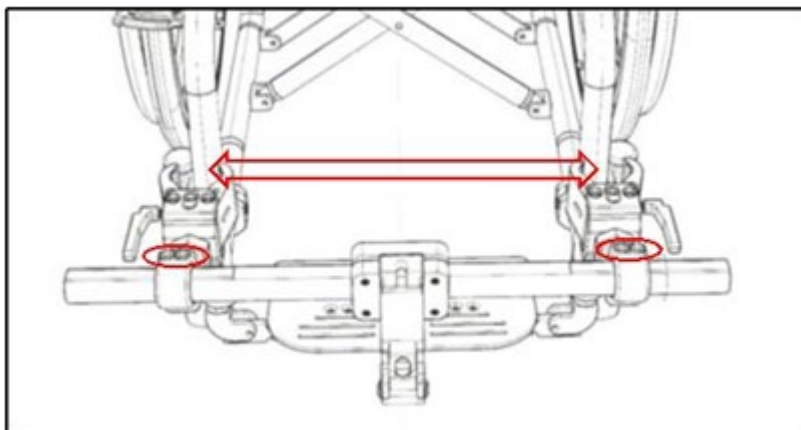

Lazítsa meg az anyákat, és állítsa be a dőlésszöget a kerekesszék típusának megfelelően.

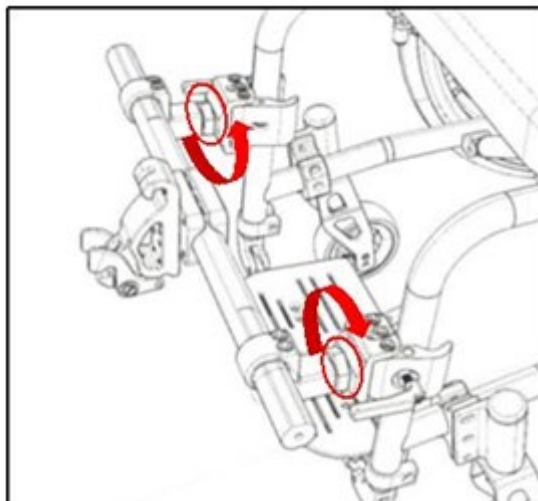

Rögzítse a motort a konzolhoz. A felső horognak 2-3 cm-rel a tartó tengelye felett kell lennie.




Ahogy a képen látható, húzza hátra a meghajtó elejét, amíg a felső horog be nem akad. Ezután fogja meg a kormányt, és tolja előre és felfelé, amíg kattanást nem hall, ami azt jelenti, hogy a horog a helyére került.




ELSŐ KEREK BEÁLLÍTÁSA

Állítsa be az első kerekek magasságát terhelés alatt. Az ajánlott szabad hely 4-6 cm a talajtól.

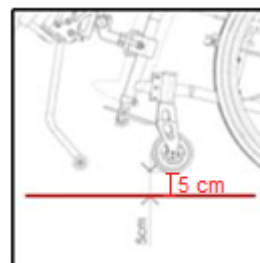


AZ ELSŐ KEREK MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Az első kerekek magasságát csak akkor állítsa be, ha a kerekesszék terhelés alatt van. Ha az első kerekek magassága a talajtól kevesebb, mint 4 cm, akkor a motortartó szögét kell beállítani. Az ajánlott távolság 4-6 cm. Lazítsa meg a megjelölt csavarokat, és fordítsa el őket körülbelül 2°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezután húzza meg a csavarokat, és ellenőrizze az első kerekek magasságát.

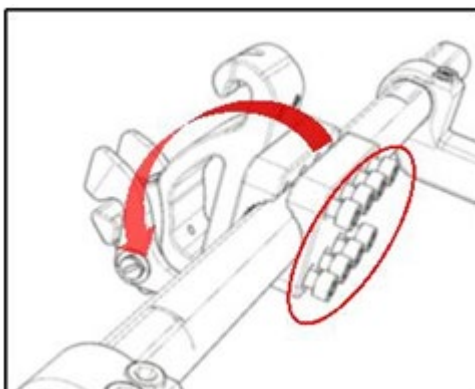

MEGHAJTÓ LEKAPCSOLÓDÁSA

Kapcsolja ki a meghajtót, és nyomja előre és felfelé a fogantyúkat, miközben a meghajtó alját maga felé tartja, amíg ki nem old. Az első kerekek elkezdnek talajt érni, nyomja le a fogantyúkat, és a meghajtó kiold.

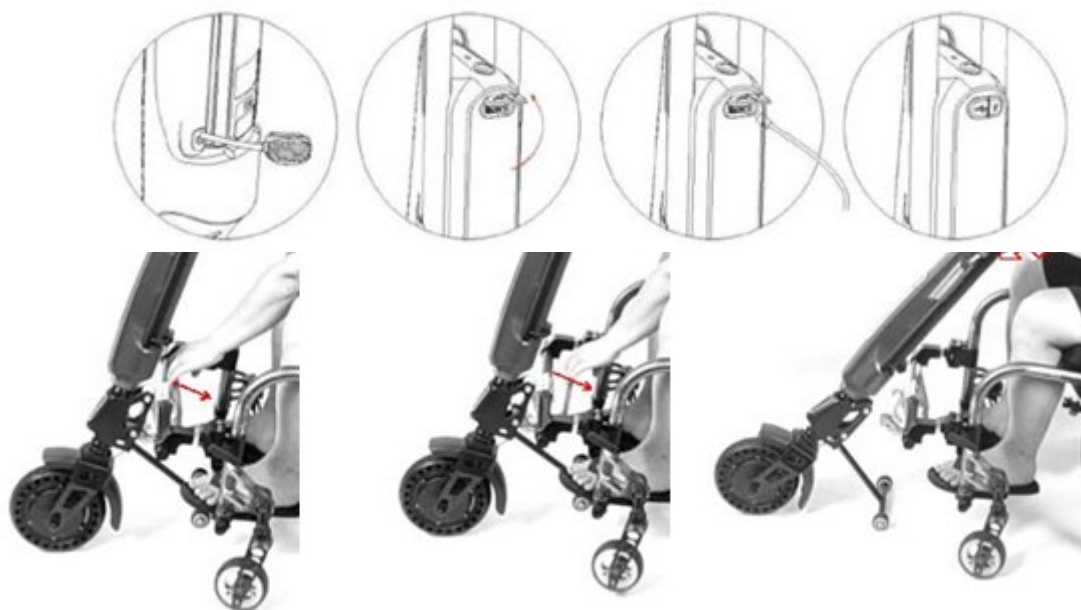

AKKUMULÁTOR

Az akkumulátor eltávolítása

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
- Oldja ki az akkumulátort, és csúsztassa felfelé.
- Húzza felfelé az akkumulátort körülbelül 1 cm-rel, majd válassza le kifelé.



Töltés

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt.
- Nyissa ki a töltőport fedelét.
- Csatlakoztassa a töltőt.
- Töltés után helyezze vissza a gumisapkát.

FIGYELMEZTETÉS



Tartsa távol az akkumulátor érintkezőit fémtől vagy vezető tárgyaktól, mert rövidzárlatot okozhatnak vagy károsíthatják az akkumulátort.



Tartsa távol gyúlékony anyagoktól.

Tartsa távol hőforrásoktól vagy nyílt lángtól.

Ne mozgassa az akkumulátort gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokkal együtt.



Ne szerelje szét és ne javítsa az akkumulátort. Sav van az akkumulátorban.



Ne dobja nyílt tűzbe.

- Ne csatlakoztassa az akkumulátort közvetlenül a töltőkábelekhez.
- Ne használja a meghajtót az akkumulátor töltése közben.
- Ne csatlakoztassa generátorhoz vagy más olyan áramforráshoz, amely nem felel meg a töltő követelményeinek.
- Védje a tápkábelt a sérülésektől.
- Gyermek és háziállatok elől elzárva tartandó.
- Ha az akkumulátor töltés közben rövidzárlatot okoz, azonnal hagyja abba a töltését.
- Az akkumulátort az első használat előtt teljesen fel kell tölteni (ez akár 24 órát is igénybe vehet).
- Az első használat után az akkumulátort teljesen le kell meríteni, mielőtt újra feltöltené.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor kellően fel van töltve. Ha az akkumulátor lemerült, a töltés 6-8 órát vesz igénybe.
- Ha nem fogja használni az akkumulátort, javasoljuk, hogy legalább kéthavonta töltse fel.
- Az akkumulátor élettartama 700 hét töltési ciklus (2-5 év).

HIBA KÓDOK

01E	Túlfeszültség védelem	Meghajtó vezérlő panel cseréje Motor cseréje
02E	Alacsony feszültségvédelem	Akkumulátor töltése vagy cseréje Nyomáskártya cseréje
03E	Nagyfeszültség elleni védelem	Vezérlőpanel cseréje Akkumulátor cseréje
04E	Blokkolt rotor védelem	Replace the electronic control system
05E	MOS hajtócső hídjának meghibásodása	Elektronikus vezérlőrendszer cseréje
06E	MOS cső alsó hídjának meghibásodása	Vezérlőpanel cseréje
07E	Hall-kábel hiba	Vezérlőpanel cseréje Kábel cseréje
09E	Fogantyú meghibásodása	Vezérlőpanel cseréje Kezelőkarok cseréje
10E	Fékhiba	Vezérlés cseréje Fékek cseréje
12E	Kommunikációs hiba	Kommunikációs kábel cseréje Vezérlőpanel cseréje
Rossz kijelző	Cserélje ki a hajtásvezérlő panelt	

A motor szabálytalanul jár	Cserélje ki a meghajtó vezérlő panelt Csatlakoztassa újra a meghajtó vezérlő panel fázisvezetékét
----------------------------	--

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.