



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

**IN 28906 Mechanikus összecsuksukható kerekesszék
inSPORTline Jakesully ultrakönnnyű (FS869LAJPF4)**



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ELŐÍRÁSOK	4
TERMÉK LEÍRÁS	4
HASZNÁLAT	5
ÁLLÍTHATÓ RÉSZEK	5
Lábtartó	5
Kartámasz	6
Ülés	6
Hátsó kerekek	7
Elülső kerekek	7
Kerék fék	8
KARBANTARTÁS	8
SPECIFICATIONS	8
KÖRNYEZETVÉDELEM	9
EC megfelelési nyilatkozat	10

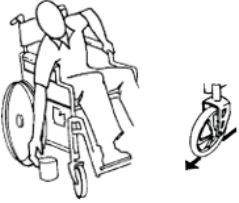
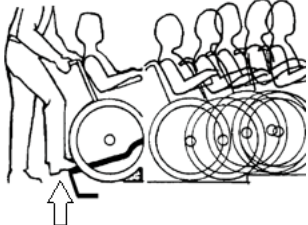
A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékein előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végezzen. Kérjük, látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu oldalra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.
- Ne használja a készüléket, ha éles szélek láthatók.
- Hiba esetén azonnal hagyja abba a használatot, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. Ne javítsa meg a kerekesszéket saját maga.
- Használat előtt tanulja meg a kerekesszék használatát, keressen egy biztonságos, szabad helyet, és kérjen segítséget egy másik személytől, amíg biztonságosan tudja használni a kerekesszéket.
- A fel- és leszállás előtt győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva.
- Mindig olyan sebességgel haladjon, hogy ne veszélyeztesse saját magát, másokat és azok tulajdonát.
- Ha nem kívánt mozgást észlel, vagy a kerekesszék hirtelen megáll, azonnal kapcsolja ki.
- Ne javítsa és ne módosítsa a terméket.
- Ha a leírt helyzetek bármelyike bekövetkezik, azonnal kapcsolja ki a kerekesszéket: hirtelen mozgás a felhasználó beavatkozása nélkül, az irány nem szabályozható, fékmeghibásodás.
- A kerekesszék egy személy szállítására van tervezve.
- Ne hajtson túl meredek lejtőkön.
- Ne vezesse a kerekesszéket kábítószer, gyógyszer vagy alkohol hatása alatt.
- Ne vontasson más járműveket vagy tárgyakat a kerekesszék mögött.
- Ne vontasson más járművek mögött a kerekesszéket.
- Ne haladja meg a megengedett legnagyobb vezetési szöget.
- A kerekesszék mozgása közben ne mozgassa hirtelen a joystickot.
- A kerekesszék csak egy személy számára használható, és ne haladja meg a kerekesszék maximális teherbírását.
- Ne hajtson burkolatlan felületen (homok, magas fű, finom agyag stb.).
- Ne hajtson lépcsőn.
- A tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a kerekesszék ki van kapcsolva.
- A kerekesszék nem közúti közlekedésre alkalmas. Csak a számára kijelölt utakon (járdán) közlekedjen.
- Ne változtassa meg hirtelen az irányt (előre – hátra). Az irányt csak akkor változtassa meg, ha a kerekesszék megállt.
- Mindig tartsa a lábát a lábtartón.
- Indulás előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött-e.
- A kerekesszéket jól szellőző helyiségben töltsen fel.
- Indulás előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész szorosan rögzítve van-e és megfelelően működik-e.
- Hátramenet előtt győződjön meg arról, hogy nincs akadály mögötte. Hátramenetben a legalacsonyabb sebességgel haladjon.
- Kerülje a hirtelen mozdulatokat és az irányváltást.

- Tartsa kezeit és lábait a kartámaszokon.
- Ne hajtsa át 5 cm-nél magasabb akadályokon.
- Ne hajtsa át 10 cm-nél hosszabb rések felett.
- Ne hajtsa olyan felületen, amely oldalirányban 3°-nál nagyobb dőlésszöggel rendelkezik.
- Ne hajtsa puha, egyenetlen vagy nem rögzített felületen (fű, kavics).
- Lejtőn lefelé haladás előtt állítsa be a legalacsonyabb sebességet, mert lejtőn lefelé haladás esetén megnő a féktávolság.
- Ne hajtsa át egyenetlen utakon, például fekvőrendőrk stb. felett.
- Ne vezessen vízben, jégen vagy hóban, illetve rossz látási viszonyok között.
- Ne hagyja a kerekesszéket közvetlen napfénynek vagy időjárási hatásoknak kitéve.
- Óvja az esőtől és a víztől.
- Terhelhetőség: 100 kg

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ELŐÍRÁSOK

		
Ne hajoljon le a kocsi széléről, kivéve, ha feltétlenül szükséges. Szükség esetén rögzítse a kerekeket.	Ne dőljön hátra, mert megváltoztathatja a súlypontját és felborulhat. lásd.	Akadályon való áthajtáskor a kerekesszéket a vázra lépve kell megdönteni.

TERMÉK LEÍRÁS



1. Fő váz

2. Háttámla

3. Kartámasz

4. Ülészék

5. Kerekek rögzítése

6. Lábtartó

7. Első kerekek

8. Hátsó kerekek

HASZNÁLAT

SZÉTNYITÁS

Fogja meg a vázat, és döntse kissé maga felé az oldalát. Fogja meg a váz másik oldalát, és húzza ki. Nyomja le az ülés tetejét, amíg a teljes váz ki nem nyílik. A kerekesszékbe való átszálláskor ne felejtse el rögzíteni a kerekeket.

ÖSSZECSUKÁS

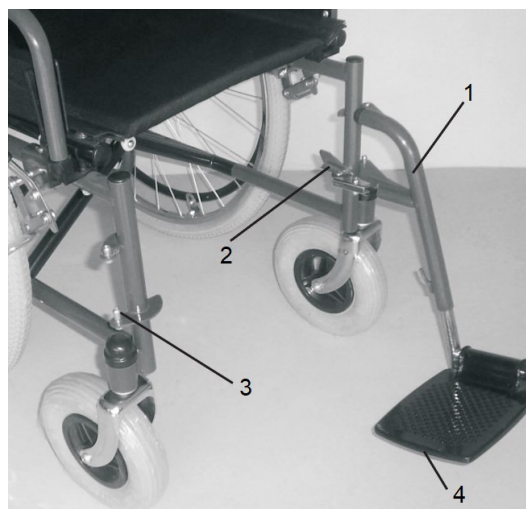
Hajtsa össze és emelje fel az állítható lábtartót a legmagasabb helyzetbe. Fogja meg a kerekesszék egyik oldalát, emelje meg kissé, és hajtsa a másik oldalra. Ezután rögzítse a kerekesszéket.

ÁLLÍTHATÓ RÉSZEK

Lábtartó

Rögzítés

Rögzítse a lábtartó keretet (1) a keret (3) zsanérjaihoz. Ezután rögzítse a fogantyúval (2). Ügyeljen a lábtartó (4) helyzetére, befelé kell néznie.



Eltávolítás

Húzza kifelé a fogantyút, majd fordítsa kifelé a keretet. Emelje le a keretet a zsanérokról.

Hosszállítás

Lazítsa meg a keret (1) alján található csavart (3), de ne vegye ki teljesen. Állítsa be az alsó keret (2) hosszát, majd rögzítse a meglazított csavarral (3).



A lábtartó magasságának beállítása

A magasság beállításakor mindig a lábtartó keretét fogja meg, ne hagyja, hogy magától leessen.

Lazítsa meg a lábtartó magasságállító fogantyúját (1), és állítsa be a magasságot. Ezután rögzítse újra a fogantyúval (1).



Kartámasz

Eltávolítás

Fogja meg a csapszeget (1), és engedje el a kartámasz elejét.

Emelje fel egyenletesen a kartámaszt a keretről (2).

Rögzítés

Helyezze a kartámaszt a keretre (2).

Rögzítse a kartámaszt egyenletesen a keret mindkét pontjához. Győződjön meg arról, hogy az eleje rögzítve van a csappal (1).



Ülés

Az üléspárna cseréje

A kerekesszék 8-10 alátétes csavarokat (2) használ az ülés rögzítéséhez.

1. Távolítsa el a csavarokat alátétekkel (2) a vázról.

2. Vegye le az ülést (3).

Ha az emelőhevederek (1) rögzítve vannak, azokat is távolítsa el.

Az ülést (3) az 1. és 2. lépés fordított sorrendjében rögzítse.



Hátsó kerekek

A beállítást csak szakképzett személy végezheti.

A váznak több kerékpozíciója van az átmérőjüktől függően (1).

Távolítsa el a porvédő sapkát, az anyát (5) és a tengelyt (2) a hátsó kerékről (3) és a vázról (5). Ismételje meg a másik oldalon.

A hátsó kereket a kerék eltávolításához képest fordított sorrendben szerelje fel.



Elülső kerekek

Beállítás

Helyezze a kerekszéket a padlóra úgy, hogy az első kerekek felemelkedjenek és rajtuk lehessen dolgozni.

Távolítsa el a porvédőt (1), és az anyával (6) állítsa be az első kerekek (5) játékát. A kerekeknek 360°-ban kell elmozdulniuk a villával (3) együtt. Ellenőrizze a kerekek (5) mozgástartományát. A beállítás után helyezze vissza a porvédőt.

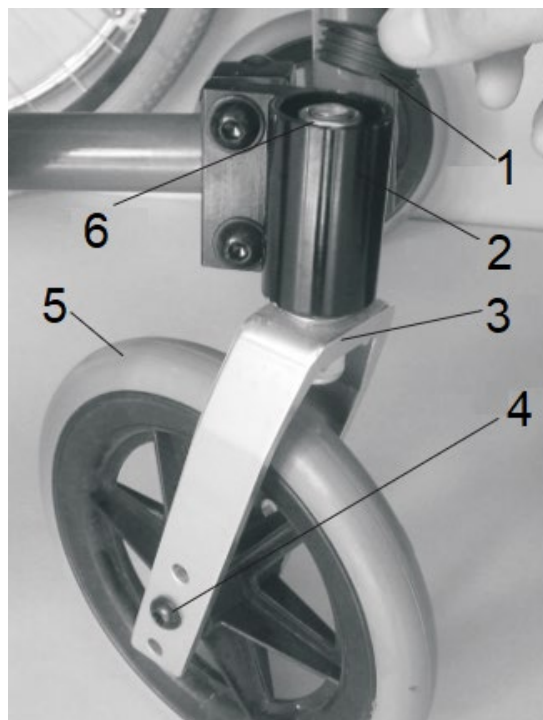
Az első kerék cseréje

A cseréhez csavarja ki a tengelycsavart (4), az alátétet és az anyát.

Cserélje ki a kereket.

Szerelje fel az új kereket a műveletek fordított sorrendben történő elvégzésével.

Cserekor mindig ügyeljen arra, hogy mindkét kerék azonos méretű legyen.



Kerék fék

Oldja ki a féket.

Távolítsa el a csavart és az anyát (3) a fékről és a vázról.

Állítsa be a féket (5) úgy, hogy használat közben fékezze a kereket. A fékezőlábnak (2) kb. 4 mm mélyen kell nyomnia a gumiabroncsot (1).

Rögzítse a csavarral és az anyával (3). Ellenőrizze a féket a fogantyú (4) segítségével.

Ismételje meg a másik oldalon.



KARBANTARTÁS

- Tisztításhoz csak enyhe mosószereket és langyos vizet használjon. Ezután alaposan szárítsa meg. Ne használjon agresszív mosószereket, fehérítőt stb.
- Tartsa tisztán a kerekeket. A szennyeződés lelassíthatja vagy teljesen leállíthatja a mozgásukat.
- Rendszeresen kenje meg az összes mozgó alkatrészt.
- A homok, a sós víz vagy a só károsíthatja a fém alkatrészeket, csapágyakat és más mozgó alkatrészeket, és a fém alkatrészek korrózióját okozhatja.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes mozgó illesztés állapotát, és szükség esetén forduljon a szervizhez.

SPECIFICATIONS

Hosszúság	101 cm
Szélesség	64 cm
Magasság	89 cm
Csomag mérete (lábtartóval)	101*28*78 cm
Csomag mérete (lábtartó nélkül)	94*28*78 cm
Összecsukott szélesség	28 cm
Háttámla magassága	40 cm
Ülésmélység	40 cm
Ülésszélesség	45,5 cm
Ülésmagasság a talajtól	51 cm
Első kerekek	20 cm
Hátsó kerekek	60 cm
Maximális teherbírás	100 kg
Nettó tömeg	13 kg

KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártát követően, vagy ha a javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően, környezetbarát módon, a legközelebbi hulladékudvarban helyezze el.

A megfelelő hulladékként elhelyezése védi a környezetet és a természeti erőforrásokat. Ezenkívül hozzájárul az emberi egészség védelméhez is. Ha nem biztos a helyes hulladékként kezelés módjában, kérdezze meg a helyi hatóságokat, hogy elkerülje a törvény megszegését vagy szankciókat.

Az akkumulátorokat ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem adja át az újrahasznosító helyre.

EC megfelelési nyilatkozat

Gyártó, akinek egyetlen meghatalmazott képviselője:

Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.) MedNet EC-Rep GmbH Borkstrasse 10.
48163 Muenster. Németország

Mi, mint a gyártó, ezennel kijelentjük, hogy a termékek

FS SOROZAT MANUÁLIS KEREKESSZÉK

Modell: Lista a mellékletben

Kereskedelmi név: MCM, EUROMIX, FS

UMDNS-kód: 16949

megfelelnek az (EU) 2017/745 orvostechnikai eszközökre vonatkozó rendelet rájuk vonatkozó rendelkezéseinek.

Az orvostechnikai eszközt az (EU) 2017/745 orvostechnikai eszközökre vonatkozó rendelet VIII. mellékletének I. szabálya szerint az I. osztályba sorolták. A következő jelzéssel rendelkezik:

Megfelelőségértékelési eljárás: EU 2017/745 II. melléklet, III. melléklet.

Alkalmazott szabványok

BS EN 12183-2014 Kézi kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek

BS ISO 10542-1-2012 Műszaki rendszerek és segédeszközök fogyatékkal élő vagy fogyatékkal élő személyek számára Kerekesszék-rögzítő és utasrögzítő rendszerek 1. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek minden rendszerre

BS ISO 10542-2-2001 Műszaki rendszerek és segédeszközök fogyatékkal élő vagy fogyatékkal élő személyek számára Kerekesszék-rögzítő és utasrögzítő rendszerek - Négyponthasznos hevederes rögzítőrendszerek ISO 7176-1-2014 Kerekesszékek - A statikus stabilitás meghatározása; Megegyezik az ISO 7176-1:1986 szabvánnyal

ISO 7176-3-2012 Kerekesszékek - A fékek hatékonyságának meghatározása; Megegyezik az ISO 7176-3:1988 szabvánnyal

ISO 7176-5-2008 Kerekesszékek - A teljes méretek, a tömeg és a fordulótér meghatározása; Megegyezik az ISO 7176-5:1986 szabvánnyal

ISO 7176-7-1998 Kerekesszékek - 7. rész: Ülészékek és kerékméretek mérése

Első kiadás

BS ISO 7176-8-2014 Kerekesszékek - Statikus, ütés- és fáradási szilárdság követelményei és vizsgálati módszerei

ISO 7176-11-2012 Kerekesszékek - 11. rész: Vizsgálati bábuk (ISO 7176-11:1992)

ISO 7176-13-1989 Kerekesszékek - 13. rész: A vizsgálati felületek súrlódási együtthatójának meghatározása Első kiadás; (CSA CAN/CSA-Z323.4.9-94)

BS ISO 7176-15-1996 Kerekesszékek - Az információk közlésére, dokumentálására és címkézésére vonatkozó követelmények

BS ISO 7176-16-:2012 Kerekesszékek - Kárpitozott részek gyulladásiállósága Követelmények és vizsgálati módszerek

BS ISO 7176-22-2014 Kerekesszékek - Beállítási eljárások

DIN ISO 6440-1994 Kerekesszékek - Nomenklatúra, kifejezések és meghatározások; Megegyezik az ISO 6440: 1985 szabvánnyal

EK megfelelőségi nyilatkozat

E-Z-0903, rev.D (DOC szám, Felülvizsgálat)

EN ISO 14971:2012 Kockázatkezelés alkalmazása orvostechnikai eszközökre

EN 980:2008 Orvostechnikai eszközök címkézésén használható szimbólumok

EN 1041:2008 Az orvostechnikai eszközök gyártója által szolgáltatott információk

EN ISO 10993-1:2009 Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése - 1. rész: Értékelés és vizsgálat a kockázatkezelési folyamaton belül

EN 62366:2015 Orvostechnikai eszközök - Használhatósági tervezés alkalmazása orvostechnikai eszközökre EN ISO 15223-1:2016 Orvostechnikai eszközök -- Az orvostechnikai eszközök címkéin, címkézésén és a szolgáltatandó információkon használható szimbólumok -- 1. rész: Általános követelmények

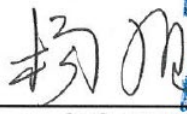
Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártott eszközök adott tételének kibocsátási dokumentumával kapcsolatban érvényes.

A fent említett megfelelőségi nyilatkozat kizárólag a következő cég felelősségi körébe tartozik:

Cég: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)

Cím: 5 Xingfu Road, A zóna, Shishan Industrial Park, Nanhai kerület, Foshan város, Kína, 528000

2024.12.18
FOSHAN, 2024-12-18


佛山市东方医疗设备厂有限公司
FOSHAN DONGFANG MEDICAL
EQUIPMENT MANUFACTORY(LTD.)
CEO, YANGZIJIAN