



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ-HU

**IN 29147 Elektromos négykerekű robogó inSPORTline
Thodor**



TARTALOM

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	3
SPECIFIKÁCIÓ	4
ÖSSZESZERELÉS.....	4
TERMÉK LEÍRÁS.....	7
VEZÉRLŐK.....	7
KIJELZŐ	8
MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT	8
A MAXIMUMSEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA 15 KM/H VAGY 20 KM/H.....	11
OLAJCSERE	12
TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS	12
HASZNÁLAT ELŐTT	12
AKKUMULÁTOR	13
HIBAELHÁRÍTÁS	14
KÖRNYEZETVÉDELEM	14

A SevenSport s.r.o. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi ha a későbbiekben szüksége lenne rá.
- Ne használja a készüléket, ha éles szélek vannak rajta.
- Hiba esetén azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a szervizhez. Ne javítsa meg egyedül a robogót.
- Használat előtt tanulja meg a robogó használatát, keressen egy biztonságos és nyitott helyet, és kérjen segítséget egy másik személytől, amíg biztonságosan nem tudja használni a robogót.
- Győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva, mielőtt fel- és leszállna.
- Mindig olyan sebességgel vezessen, hogy önmagát, másokat és vagyonukat ne veszélyeztesse.
- Mindig azt javasoljuk, hogy a legalacsonyabb sebességfokozattal indítsa el.
- Egyes kommunikációs eszközök ugyanazon a frekvencián működhetnek, mint a robogó távirányítója. Ha van ilyen eszköz (telefon stb.), ellenőrizze, hogy nem zavarja-e a vezérlőt.
- Egyes adók zavarhatják a robogó távirányítóit.
- Ha bármilyen nem kívánt mozgást észlel, vagy a robogó hirtelen leáll, azonnal kapcsolja ki.
- Ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
- Ha a leírt helyzetek bármelyike előfordul, azonnal kapcsolja ki a robogót: hirtelen mozgás felhasználói beavatkozás nélkül, a menetirány nem szabályozható, fékhiba.
- A robogót egy személy szállítására tervezték.
- Ne vezessen túl meredek lejtőn.
- Ne vezessen kábítószer, gyógyszer vagy alkohol hatása alatt.
- Ne vontasson más járműveket vagy tárgyakat a robogó mögött.
- Ne vontassa a robogót más járművek mögé.
- Ne lépje túl a megengedett legnagyobb vezetési szöget.
- A robogó csak egy személy számára készült, és ne lépje túl a robogó maximális teherbírását.
- Ne kapcsolja ki a robogót mozgás közben, mert ez károsíthatja a motort vagy a kezelőszerveket. Csak akkor kapcsolja ki a robogót, ha elveszíti az irányítást.
- Ne vezessen nem burkolt felületen (homok, magas fű stb.)
- Ne vezessen lépcsőn.
- Tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a robogó ki van kapcsolva.
- Ne kapcsolja be a robogót, ha nem ül rajta.
- A robogó nem közúti használatra készült. Csak az erre kijelölt utakon (járdán) közlekedjen.
- Ne változtasson hirtelen irányt (előre - hátra). Változtassa meg a haladási irányt, amikor a robogó megáll.
- Lefelé mindig a legalacsonyabb sebességgel haladjon, a joystickot a középső pozíció közelében hagyva.
- Mindig tartsa a lábát a lábtartón.
- Indulás előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- A robogót jól szellőző helyiségben töltsen.

- Indulás előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész meg van-e húzva és megfelelően működik-e.
- Tolatás előtt győződjön meg arról, hogy nincs akadály mögötte. Hátramenet a legalacsonyabb sebességre.
- Kerülje a hirtelen mozgásokat és a hirtelen irányváltásokat.
- Kezét és lábát tartsa a karfákon.
- Ha dombon halad, ne tolasson.
- Ne vezessen puha, egyenetlen vagy nem rögzített felületen (fű, kavics).
- Lefelé haladás előtt állítsa be a legalacsonyabb sebességet, lefelé haladva megnyő a fékút.
- Ne vezessen át egyenetlenségeken, például oszlopokon stb.
- Ne vezessen vízben, jégen vagy havon, illetve rossz látási viszonyok között.
- Ne hagyja a robogót közvetlen napfénynek vagy az időjárásnak kitéve.
- Óvja esőtől és víztől.
- A vezérlőpanel nem vízálló.
- Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát. Az elhasználódott gumikat azonnal cserélje ki.
- Ne vezessen esőben vagy nedves úton. Fennáll az elektronika és az akkumulátor károsodásának veszélye.

SPECIFIKÁCIÓ

Motor	Differenciálművel 48V 500W	Max. sebesség	16 km/h
Akkumulátor	48V 20Ah ólomakkumulátor	Méret	144*64*123 cm
Fékek	Elektromágneses fék	Téherbírás	150 kg
Gumiabroncsok	AT13*5-6 belsónélküli	Max. emelkedés	15°

A kerekesszék maximális sebessége az ország/régió jogszabályaitól függ.

ÖSSZESZERELÉS

Csomagolja ki az összes alkatrészt a csomagból. Tükrök, töltő adapter, kulcsok, fejtámla, kézikönyv, kosár, tok, csavarok.



A kormányoszlop beállítása

Lazítsa meg a kézi gombot, és állítsa be a kormányt a kívánt helyzetbe. Ezután húzza meg újra a csavart.



A fejtámla felhelyezése

Nyomja meg a reteszt, és csúsztassa a fejtámlát a háttámlába.



Visszapillantó tükrök

Rögzítse a tükröket, és állítsa be őket úgy, hogy jól lásson maga mögött.



Kosár

Rögzítse a kosarat a kormánytartóhoz.



Csomagtartó

Rögzítse a tokot az ülés háttámlájához 4 csavarral.



Főkapcsoló

Kapcsolja a főkapcsolót bekapcsolt állásba.




TERMÉK LEÍRÁS




1. Visszapillantó tükrök	8. Kartámasz
2. Irányjelzők	9. Ülésforgató kar
3. Kosár	10. Elektromágneses fékkar
4. Kormányoszlop	11. Töltőport
5. LED lámpa	12. Csúszásgátló futófelület
6. Fejtámla	13. Bekapcsológomb
7. Csomagtartó	14. Ülés magasság-állítás

VEZÉRLŐK

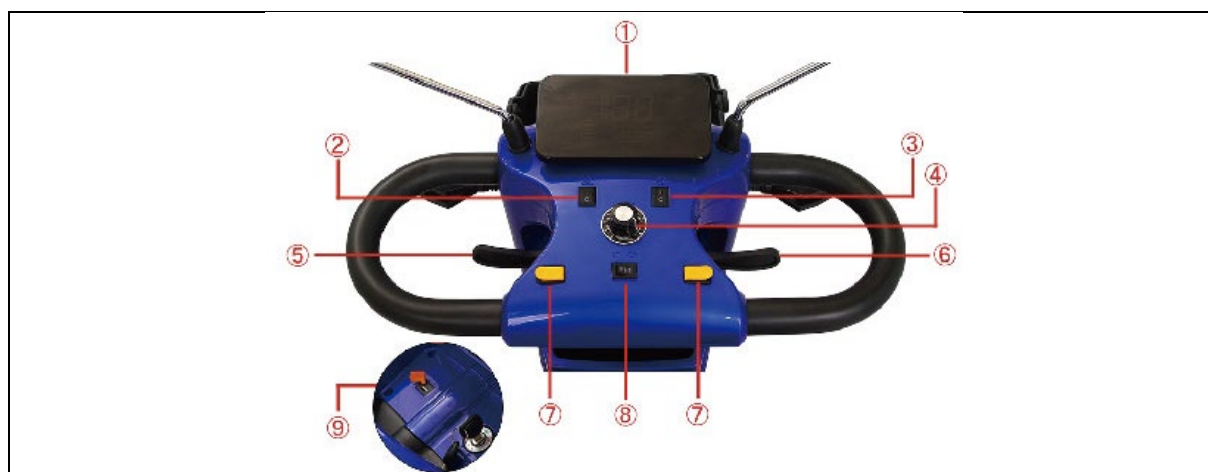

1. Kijelző	6. Gázkar
2. Vészvillogó	7. Duda
3. LED lámpák	8. Irányjelző
4. Maximális sebesség beállítása	9. USB töltőport
5. Hátrameneti fokozat	

KIJELZŐ

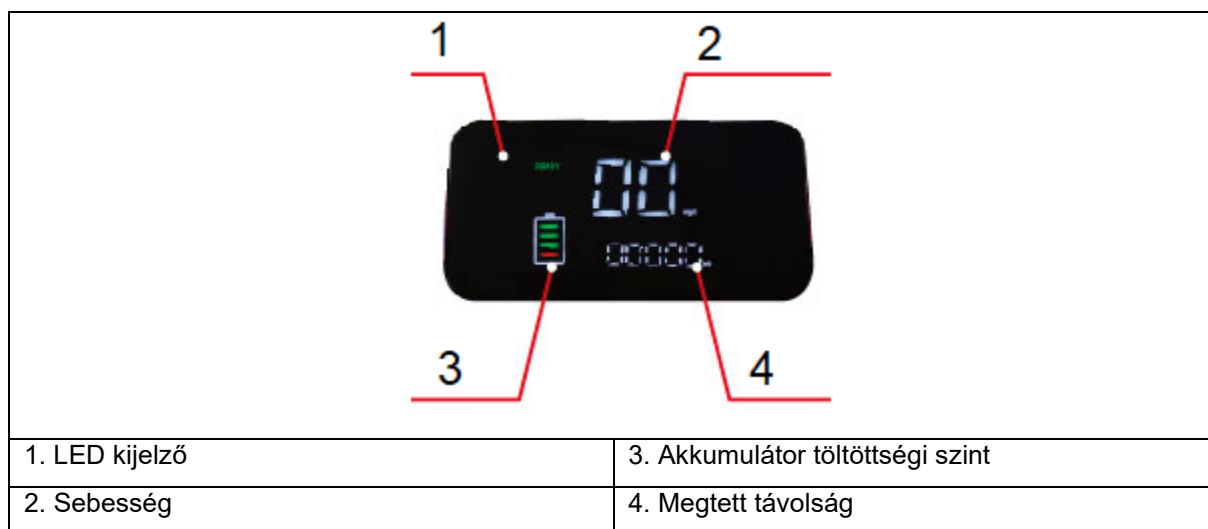

MŰKÖDÉS ÉS HASZNÁLAT

A kerekesszék hátulján található: az elektromágneses fékkar, a borulásgátló kerekek és a hajtótengely.


Elektromágneses fék

Automatikus mód (D):

Vezetés előtt ellenőrizze, hogy az elektromágneses fékkar automatikus módba van-e kapcsolva. Ebben a módban a kerekesszék a gázkarral és a fékekkel vezérelhető.

Kézi mód (N):

Ez az üzemmód csak akkor használatos, ha a kerekesszéket tolni kell.

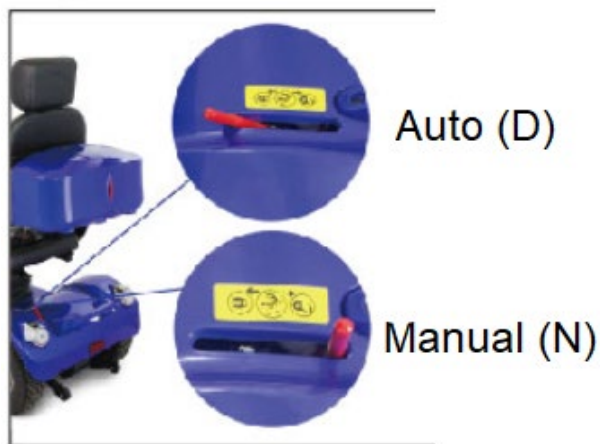

Gyújtás

Indítás: Helyezze a kulcsot a gyújtáskapcsolóba, és fordítsa jobbra. A LED kijelző világítani fog.

Kikapcsolás: Fordítsa a kulcsot balra.

FIGYELMEZTETÉS: Ha vezetés közben a kulccsal kikapcsolja a kerekesszéket, a kerekesszék automatikusan leáll.

Gázkar

A gázkarral szabályozhatja az előre- és hátrameneti sebességet. A robogónak teljesen meg kell állnia hátramenet előtt.

Ha elengedi a gázkart, a robogó lelassul, amíg meg nem áll.

FIGYELMEZTETÉS: Nedves, csúszós vagy jeges úton történő vezetés növeli a féktávolságot. Lejtmenetben mindig szabályozza a sebességét.

Maximális sebesség beállítása

A legalacsonyabb és a legmagasabb sebességet a gombbal állíthatja be. Min. 1,6 km/h, max. 16 km/h.

Töltés

Az első használat előtt tölts fel a kerekesszéket. Rendszeresen tölts fel a kerekesszéket, ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön.

A töltőport az első ülés alatt található. Csatlakoztassa a töltőt a töltőporthoz, majd a konnektorba. Töltés közben a töltőn lévő jelzőfény pirosan világít, a töltési idő kb. 8-10 óra. Miután az akkumulátor feltöltődött, a jelzőfény zölden világít. A töltő töltés közben meleg lehet, a kerekesszéket mindig folyamatos felügyelet mellett tölts, gyúlékony anyagoktól távol.



FIGYELMEZTETÉS: Óvja a töltőt a fizikai sérülésektől, leejtésektől és ütésektől. Tartsa távol alacsony hőmérséklettől és páratartalomtól.

ÁLLÍTHATÓ ALKATRÉSZEK

Kormány helyzete

Lazítsa meg a kézi beállítócsavart, és állítsa be a kormány helyzetét. Ezután húzza meg újra a gombot.



Üléspozíció

Állítsa be az üléspozíciót az ülés alatti karral. Engedje el a kart a rögzítéshez.



Háttámla helyzete

A háttámla dőlésszögét a karral állíthatja be. A pozíció rögzítéséhez engedje el a kart.



Kartámasz beállítása

A kartámasz szögét a kartámaszok alatt található kézi gombbal állíthatja be.



Ülés forgatása

Húzza előre a kart az ülés kívánt helyzetbe forgatásához.



Ülésmagasság-állítás

Lazítsa meg a kézi gombot, és nyomja vagy húzza az ülést a kívánt magasság eléréséhez. Ezután rögzítse a gombbal.



Kulcs vezérlés



1. Kapcsolja be a riasztót.
2. Kapcsolja ki a riasztót.
3. Keresse meg a kerekesszéket.
4. Nyomja meg 2x a kocsit elindításához.

Tárolás

Minden rakományt megfelelően rögzíteni kell. A túlméretezett vagy kiegyensúlyozatlan tárgyak szállítása befolyásolhatja a jármű kezelhetőségét.



A MAXIMUMSEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA 15 KM/H VAGY 20 KM/H

A kormányon található egy gomb a maximális sebesség módosításához. A gomb megnyomásakor a maximális sebesség 20 km/h.

Ezután a műszerfalon található forgatógombbal állítsa be a beállított maximális sebesség százalékos arányát, például:

Beállított maximális sebesség – 15 km/h, a forgatógomb 50%-os teljesítményre van állítva – a maximális sebesség 7,5 km/h lesz.

Beállított maximális sebesség – 20 km/h, a forgatógomb 50%-os teljesítményre van állítva – a maximális sebesség 10 km/h lesz.



OLAJCSERE



764 / 5 000

Döntse meg a kocsit. A leeresztő csavar (1) az alján található.

Ne felejtse el egy edényt a csavar alá helyezni az olaj felfogásához. Az olaj leeresztése után csavarja vissza a csavart. Csavarja le a hátsó kereket, és helyezze a kerekesszéket egy állványra. Csavarja ki a betöltő csavart (2), és tölts fel olajjal (ASE 85W-90, 120-130 ml). Használjon tölcserőt a feltöltéshez. Ellenőrizze az olajszintet, és húzza meg a csavart. Szerelje fel a hátsó kereket, és ellenőrizze a rögzítést.

Első olajcsere 1000 km után vagy az eladás dátumától számított 2 éven belül.
--

Következő olajcsere 5000 km után vagy az első olajcserétől számított 2 éven belül.
--

A következő olajcsere 5000 km megtétele után vagy az előző olajcserétől számított 2 éven belül esedékes.
--

Ellenőrizze az olaj állapotát, szükség esetén cserélje ki az olajat, ha a kerekesszéket 4 hónapnál hosszabb ideig nem használták.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Törölje át a felületi szennyeződéseket egy nedves ruhával, kevés, nem maró hatású tisztítószerrel. Ezután szárítsa meg a kerekesszéket.
- Ne használjon maró hatású tisztítószerket és oldószereket a tisztításhoz.
- Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a kerekesszék főkapcsolóját.
- Az akkumulátor védelme érdekében minden használat és az azt követő tárolás után kapcsolja ki a roller főkapcsolóját.
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a kerekesszéket, rendszeresen tölts fel (havonta egyszer).
- A rollert száraz, árnyékos és jól szellőző helyen kell tárolni.
- Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a robogó elektromos alkatrészeibe.
- Ne tisztítsa a robogót nagynyomású tisztítóval.

HASZNÁLAT ELŐTT

Vezetés előtt ellenőrizze a következőket:

- A fékek, lámpák működőképessége, a kormány mozgása és hézaga stb.
- Ellenőrizze a megfelelő abroncsnyomást és állapotot.

- Állítsa az ülést a megfelelő helyzetbe.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi állapotát.

AKKUMULÁTOR

A gélelektrolittal rendelkező akkumulátorok karbantartásmentesek, és általában stabilabbnak, biztonságosabbnak és kevésbé kockázatosnak tekintik őket, mint a lítium-ion akkumulátorokat, amelyek biztonságos működést biztosítanak még hosszú távú használat során is. Az akkumulátorok rendkívül hatékonyak és alacsony az önkisülésük. Javasoljuk, hogy rendszeresen, körülbelül havonta egyszer töltsen fel az akkumulátort, még akkor is, ha nincs használatban, és tárolja a kapacitásának 60-80%-ára feltöltve.

Ellenkező esetben az akkumulátor károsodhat, ami rövidebb hatótávolságot, vagy rosszabb esetben teljes működésképtelenséget okozhat. A rendszeres töltés meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Javasoljuk, hogy az első használat előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort.

Figyelmeztetés! Soha ne hagyja lemerülten az akkumulátort! Mindig töltsen fel az akkumulátort, amíg a töltésjelző már nem mutatja a teljes akkumulátor töltöttségét.

Az akkumulátor megfelelő működése és biztonságos használata érdekében kövesse a kézikönyvben található utasításokat. Ha az akkumulátor sérült, folyadék szivárog belőle, vagy szokatlan szagot áraszt, azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát.

- Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha olyan akkumulátort használ, amely meghaladja a normál élettartamát, a töltési gyakoriság megnőhet, és a hatótávolság csökkenhet.
- Ne nyissa ki az akkumulátort, és ne dobja tűzbe. Ne helyezzen idegen tárgyakat az akkumulátorba.
- Az akkumulátor töltéséhez ideális hőmérséklet +10 °C és +30 °C között van.
- Ha hideg környezetben használja az akkumulátort, a hatótávolsága csökken.
- Ne javítsa vagy módosítsa az akkumulátort saját kezűleg.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A mellékelt intelligens töltő automatikusan leválasztja a töltőt, amikor az akkumulátor 100%-ban fel van töltve – túltöltésvédelemmel rendelkezik.

Soha ne takarja le a töltőt töltés közben, különben megsérülhet.

A töltő megsérülhet víz, ütések stb. miatt. Ebben az esetben a jótállási időszak nem érvényes. Az akkumulátort csak akkor töltsen, ha nincs használatban.

Soha ne töltsen az akkumulátort az akkumulátorhoz mellékelttől eltérő töltővel. Ellenkező esetben komoly veszélye van az akkumulátor károsodásának vagy tönkremenetelének.

Töltési eljárás

1. Távolítsa el a töltőcsatlakozó (aljzat) védősapkáját, és helyezze be a töltőcsatlakozót (dugót).
2. Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz (230 V).
3. A töltési folyamat akkor működik, ha a töltő LED-je pirosan világít. Amikor az akkumulátor feltöltődött, a LED-es lámpa zöldre vált.
4. Az akkumulátor feltöltése után húzza ki a töltőt a hálózathoz, és a töltő csatlakozóját (dugóját) a csatlakozóból (aljzathoz).
5. Óvatosan zárja le a készülék töltőcsatlakozóját a védőkupakkal.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba	Ok	Megoldás
A kerekesszék nem indul el	Gyújtás kikapcsolva	Fordítsd a kulcsot járat állásba.
	Akkumulátor lemerült	Töltsd fel az akkumulátort.
	A főkapcsoló ki van kapcsolva	Fordítsd a gyújtáskapcsolót járat állásba.
	Az elektromágneses fékek nincsenek bekapcsolva	Helyezd a fékkart (D) állásba.
	Sérült motor	Ellenőrizd a csatlakozást, cseréld ki a motort.
	Sérült vezérlőegység	Ellenőrizd a csatlakozást, cseréld ki a vezérlőegységet.
A töltésenkénti hatótávolság rövid	Az akkumulátor nincs feltöltve	Töltsd fel az akkumulátort.
	Rossz vezetési körülmények	Ha lehetséges, válassz jobb vezetési körülményeket.
Az akkumulátor nem töltődik	Rossz aljzat	Ellenőrizd, használj másik aljzatot.
	Megengedett csatlakozások	Ellenőrizd a csatlakozásokat.
	Sérült töltő	Cseréld ki a töltőt.

A fenti információk csak az alapvető megoldásokra vonatkoznak. Soha ne javítsa saját kezűleg a robogót, és forduljon a szervizhez.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi

törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvjaa a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.