



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU

IN 29200 Elektromos karbon kerekesszék inSPORTline Feally



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
SPECIFIKÁCIÓ.....	4
ELEKTROMOS ÁRAMKÖR VÁZLAT.....	4
TERMÉK LEÍRÁS.....	5
ÖSSZESZERELÉS.....	5
HASZNÁLAT.....	7
AKKUMULÁTOR.....	8
INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTORRÓL.....	8
TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM ÉS TÁMOGATÓ VÉDELEM.....	8
FÉK.....	8
BIZTONSÁGI ÖV.....	8
VEZETÉS.....	9
PROBLÉMAMEGOLDÁS.....	10
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS.....	11
RENDSZERES ELLENŐRZÉSEK.....	11
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	11

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végrehajtsa termékeiben. Látogasson el a www.insportline.cz weboldalunkra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg azt a jövőbeni használatra.
- A kocsi hirtelen mozgása, a vezérlés meghibásodása vagy egyéb meghibásodás esetén azonnal állítsa le a kocsit.
- A kezelés megismerése érdekében mindig végezzen bemutató utat ismert környezetben és más személy felügyelete alatt.
- A kocsit a helyi rendeleteknek, előírásoknak és törvényeknek megfelelően használja.
- Tartsa ujjait és végtagjait távol a mozgó alkatrészekről.
- Ne használjon kopott vagy sérült kerekesszéket.
- Ha a kerekesszéken éles élek jelennek meg, ne használja azt.
- Ne módosítsa és ne alakítsa át a kerekesszéket. Kizárólag a kerekesszék gyártási céljának megfelelően használja.
- A kocsit csak olyan személy használhatja, aki ismeri a kezelését és a biztonságos üzemeltetését.
- Védje a kocsit fizikai sérülésektől, esésektől és ütésektől.
- Védje az akkumulátort a fizikai sérülésektől, esésektől és ütésektől.
- Ha az akkumulátorból szag, füst vagy folyadék távozik, azonnal válassza le, és ha lehetséges, helyezze a kocsit gyúlékony és robbanásveszélyes tárgytól távol.
- Csak eredeti akkumulátort és töltőt használjon.
- A kocsit folyamatos felügyelet mellett és gyúlékony és robbanásveszélyes tárgytól távol töltsen.
- Töltés közben a kocsi nem működhet.
- Védje az elektromos alkatrészeket a víz behatolásától.
- Ne tegye ki hosszabb ideig napfénynek.
- Ha a kocsi nincs beindítva és nem mozog, ne mozgassa a vezérlő joystickot.
- Ne hajtson túl meredek dombokon, mert fennáll a felborulás veszélye.
- Lejtőn haladva tartsa kézben a sebességet, ne gyorsítson.
- Nedves vagy csúszós úton a féktávolság megnő, és fennáll a veszélye, hogy elveszíti az irányítást a kocsi felett.
- Ne tegye ki hosszabb ideig kedvezőtlen időjárási hatásoknak.
- A kocsi egy személy szállítására alkalmas.
- A kocsi nem vontatőeszközként készült.
- Ne húzza a kocsit egy másik jármű után.
- Fizikai korlátozottságú vagy mentális zavarokkal küzdő személyek csak felnőtt felügyelete vagy gondviselő kíséretében használhatják a kocsit.
- Ne használja alkohol, drogok vagy a ítélőképességet és reflexeket befolyásoló gyógyszerek hatása alatt.

SPECIFIKÁCIÓ


Teherbírás:	120 kg
Bruttó tömeg:	19 kg
Nettó tömeg:	13,36 kg
Csomagolás mérete:	780*350*795 mm
A kocsi szétszerelt mérete:	910*560*850 mm
Összecsukott kocsi mérete:	920*230*700 mm
Az ülés mérete:	440*400 mm
Üzemi hőmérséklet:	5°C ~ 40°C
Max. áthajtási szélesség:	10 cm
Max. akadálymagasság:	2 cm
Max. emelkedés:	10°
Relatív páratartalom:	15% - 90%
Motor:	2x 24V200W
Max. hatótávolság egy feltöltéssel:	20 – 25 km*
Max. sebesség:	6 km/h
Váz anyaga:	Szénszál

* A hatótávolság számos tényezőtől függ, mint például a vezetési stílus, az útburkolat, a környezeti hőmérséklet, a felhasználó súlya, az időjárási körülmények és egyéb tényezők.

ELEKTROMOS ÁRAMKÖR VÁZLAT

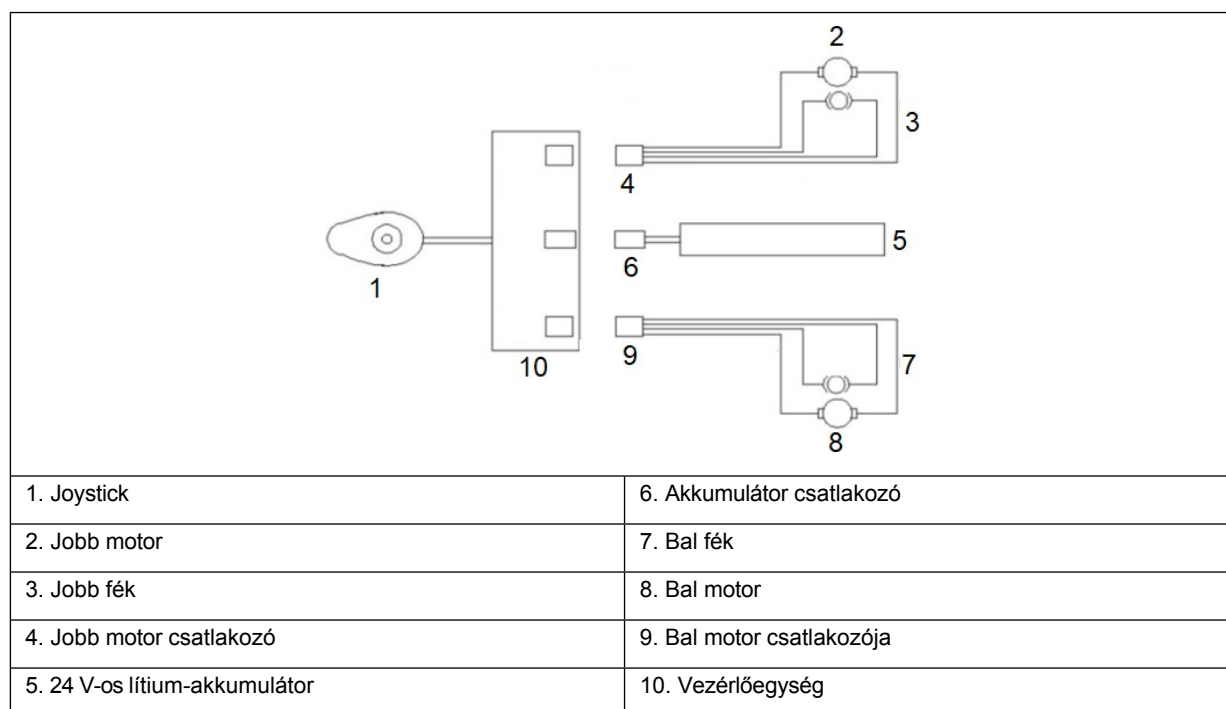

TERMÉK LEÍRÁS

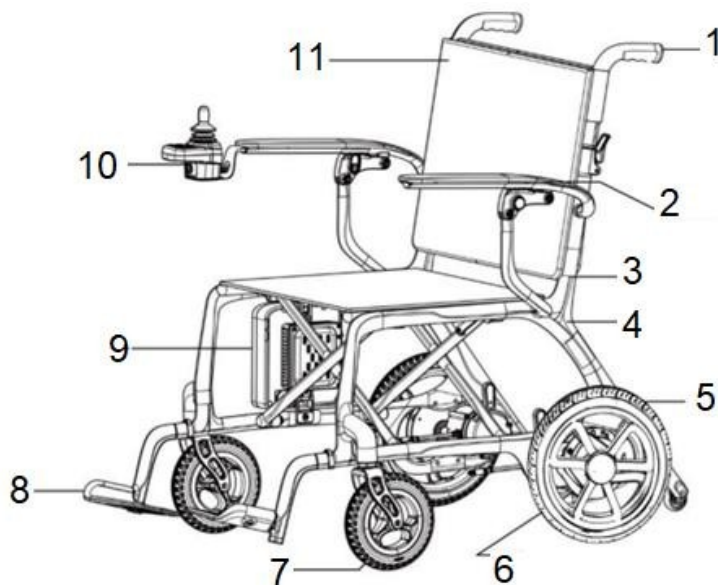

1. Tolófogantyúk	7. Első kerekek
2. Kéztámasz	8. Lábpárna
3. Üléskeret	9. Az akkumulátor elhelyezkedése
4. Váz	10. Vezérlő joystick
5. Hajtómű	11. Háttámla
6. Motor	


ÖSSZESZERELÉS

Vegye ki a kerekesszéket a szállítócsomagolásból, és nyissa ki a keretét (3. ábra). Emelje fel a kartámaszokat, amíg azok a csapszeggel rögzülnek (4. ábra).

Helyezze a vezérlőpanelt a joystickkel a kartámaszokra (5. ábra).

Rögzítse a lábtámaszokat, és rögzítse őket csapszeggel (6. ábra).


3. ábra

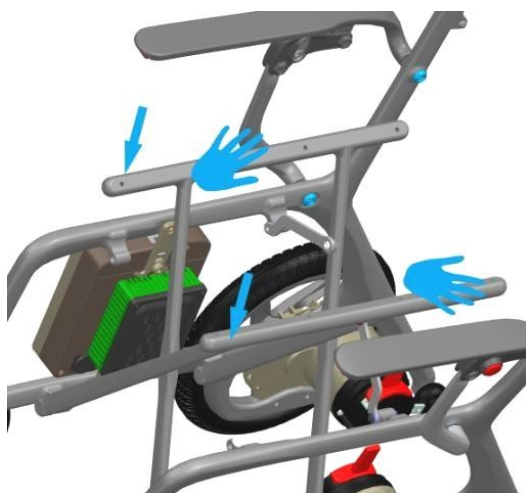

4. ábra



5. ábra

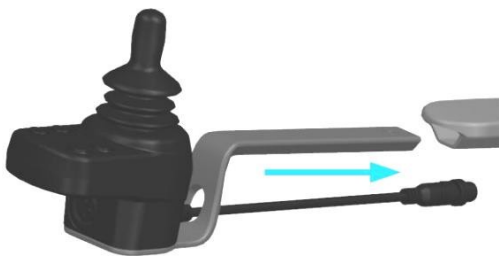

6. ábra



ÖSSZESZCSUKÁS

Hajtsa be a lábtartókat 90°-kal (7. ábra). Nyomja meg a reteszt, és hajtsa be a fogantyúkat (8. ábra).

Fogja meg az ülés keretét, és hajtsa össze a szerkezetet (9. ábra). Az ülés mindkét oldalán található hevedereket használhatja a fogáshoz és az áthelyezéshez (10. ábra).

7. ábra



8. ábra



9. ábra




10. ábra



11. ábra




12. ábra

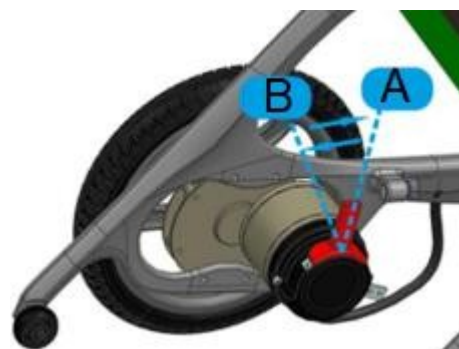

A fék (12. ábra) a kocsitolásához vagy motoros meghajtással való mozgatásához szolgál. Ha a fék A helyzetben van, a kocsit NEM lehet tolni, csak motoros meghajtással lehet mozgatni. Ha a fék B helyzetben van, a kocsit lehet tolni.

A kartámaszok a kartámaszok oldalán található gomb megnyomásával emelhetők fel (11. ábra).

VEZÉRLÉS

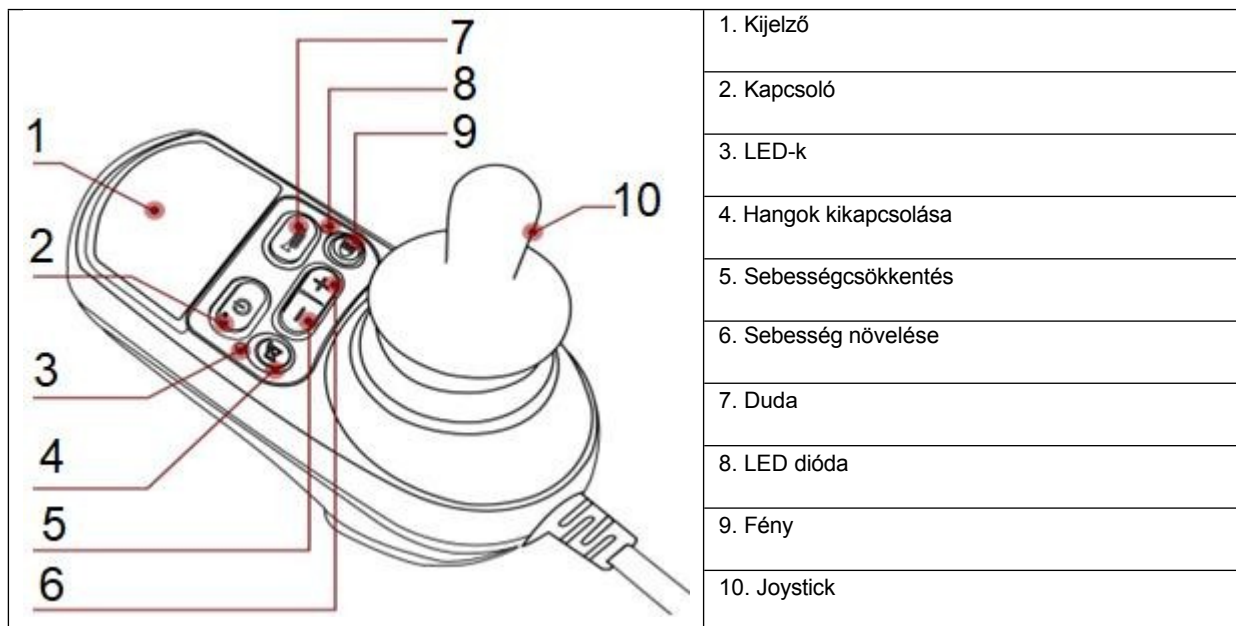

A kocsit a kapcsoló megnyomásával indíthatja el. A kapcsolót ne használja a kocsi leállításához (csak vészhelyzetben használható).

A haladás irányát és sebességét a joystick segítségével szabályozhatja. Minél tovább van a joystick a középponttól, annál gyorsabban halad. Ha elengedi a joystickot, az visszatér a középpontba, és a kocsi automatikusan leáll.

A megfelelő gombokkal beállíthatja a maximális sebességet.

FIGYELMEZTETÉS: Meghibásodás vagy a kocsi váratlan mozgása esetén azonnal engedje el a joystickot. A kocsi leáll.

A készülék akkumulátorát a töltőpontra keresztül töltsen fel. Csak eredeti töltőt és megfelelő áramforrást használjon.

FIGYELMEZTETÉS: Ne csatlakoztasson más eszközt a töltőporthoz. Az akkumulátor feltöltése

Az első használat előtt töltsen fel az akkumulátort. Az akkumulátor töltési ideje 6–8 óra. 4–5 töltési ciklus után az akkumulátor kapacitása 100%.

Az akkumulátor műszaki adatai:

Típus	Lítium akkumulátor
Méret	187*151*57 mm
Feszültség	24 V
Kapacitás	6Ah*2
Töltési ciklusok	300 ciklus

Figyelem: Töltsen a készüléket jól szellőző helyiségben. Az akkumulátor kapacitása alacsony hőmérsékleten csökken.

A töltő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a vezérlőpanel ki van kapcsolva. Csatlakoztassa a töltőt a vezérlőpanelhez. Töltés közben a kék LED világít, töltés után a zöld LED világít.

Az akkumulátor töltési ideje 6–8 óra. A töltés után húzza ki a töltőt.

A töltő műszaki adatai:

Kimeneti áram	2A
Üzemi hőmérséklet	-10 ~ 45 °C
Tölthető akkumulátor kapacitása	2A
Csapok	1 pólus +, 2 és 3 pólus -
Bemeneti feszültség	100-240 V
Kimeneti feszültség	24 V
Tölthető akkumulátor típusa	24 V/6 Ah lítium akkumulátor, 144 Wh
Védettség	IPX 1

AKKUMULÁTOR

Garancia 6 hónapos garancia az akkumulátor élettartamára – az akkumulátor névleges kapacitása a termék értékesítésétől számított 6 hónap alatt nem csökken 70 % alá a teljes kapacitáshoz képest.

Az akkumulátor megfelelő működése és biztonságos használata érdekében kövesse a kézikönyvben szereplő utasításokat. Ha az akkumulátor megsérült, folyadék szivárog belőle vagy szokatlan szagot áraszt, azonnal hagyja abba az akkumulátor használatát.

- Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha a normál élettartamot meghaladó ideig használja az akkumulátort, akkor a töltési gyakoriság növekedhet és a hatótávolság csökkenhet.
- Ne nyissa ki az akkumulátort és ne dobja tűzbe. Ne helyezzen idegen tárgyakat az akkumulátorba.
- Ne érintse meg az akkumulátort fémtárgyakkal. Az akkumulátor felrobbanhat vagy megsérülhet.
- Csak eredeti töltőt használjon.
- Vezetés közben tartsa be a helyi előírásokat és törvényeket.
- Az akkumulátort folyamatosan lehet tölteni.
- Az akkumulátor töltésének ideális hőmérséklete +10 °C és +30 °C között van.
- Ha a akkumulátort hideg környezetben használja, annak hatótávolsága

csökken. Ne javítsa és ne módosítsa a akkumulátort saját maga.

AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az akkumulátort használat után minél gyakrabban töltsse fel. Az akkumulátor fokozatosan lemerül, még akkor is, ha nem használja. Ha a kocsit nem használja rendszeresen, hetente egyszer töltsse fel az akkumulátort. Csak eredeti töltőt használjon.

TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM ÉS ALÁTÁMASZTÁS

Ha a védelem bekapcsol, a kocsit automatikusan kikapcsolja az áramellátást. Az áramellátás helyreállításához húzza ki, majd dugja be újra az akkumulátor csatlakozóját a vezérlőpanelbe.

FÉK

Ha azt szeretné, hogy a kocsit a helyén maradjon, állítsa a féket felső helyzetbe. Ha tovább szeretne haladni, a féket alsó helyzetbe kell állítania.

BIZTONSÁGI ÖV

A vezetés során a felhasználónak biztonsági övvel kell rögzítenie magát.




Vezetés közben ne dohányozzon, tartsa távol magát a nyílt lángtól, és ne fogyasszon alkoholt vagy a ítélőképességet befolyásoló gyógyszereket.

VEZETÉS


Az első utazást és a kocsit kezelését gyakorolja sík, nyitott és ismert terepen. Az első utazást más személy támogatásával és segítségével hajtsa végre.

A felülés előtt győződjön meg arról, hogy a jármű ki van kapcsolva. Felülés és leszállás közben ne lépjen a lábtartókra.


Az első vezetés során állítsa a sebességet a legalacsonyabb szintre. Próbálja ki az előre/hátra mozgást, majd próbálja ki a kanyarodást vezetés közben.

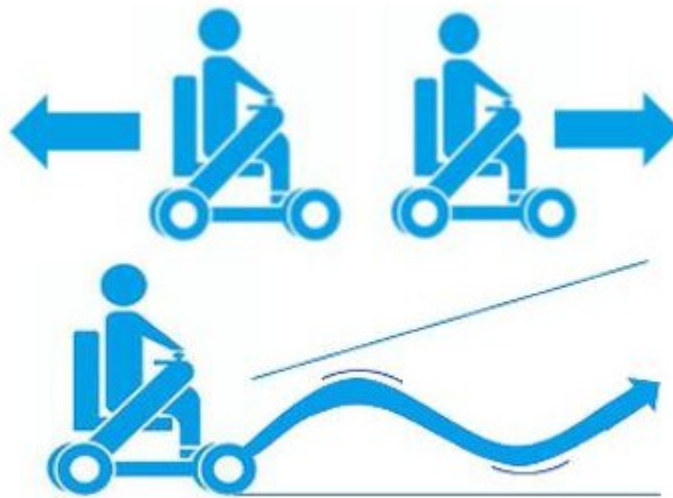

Minél távolabb van a joystick a középponttól, annál gyorsabban halad. Lassan és óvatosan tolatjon. Ha megállni szeretne, engedje el a joystickot, az automatikusan visszatér a középpontba, és a kerekek megállnak.

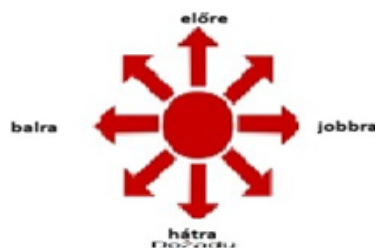

Ne hajtson át olyan akadályokon, amelyek magasabbak 3 cm-nél, szélesebbek 10 cm-nél.

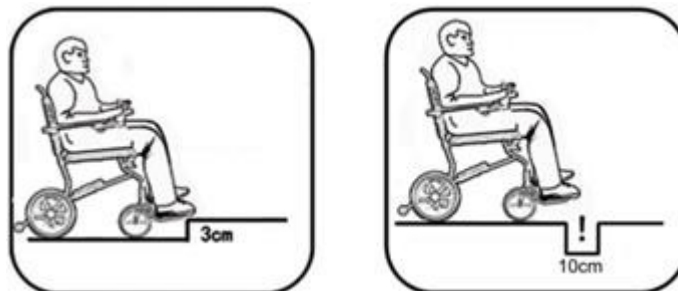

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

A vezérlőpanel hangjelzéssel jelzi a hibákat.

1 hangjelzés	Alacsony feszültség	Gyenge akkumulátor, töltsé fel. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor a vezérlőegység feszültségérzékelőjének hibája.
2 hangjelzés	A motor bal oldali fázisa hiányzik	Ellenőrizze a motor bal oldali kábelkötegének csatlakozását. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a motor bal és jobb oldali kötegét. Ha 4 hangjelzés hallatszik, az a bal motor meghibásodását jelenti. Ha 2 hang hallatszik, akkor a vezérlőegység hibás és a bal motor fázisa hiányzik.
3 hangjelzés	Bal fék	Ellenőrizze, hogy a fék a megfelelő helyzetbe van-e kapcsolva, és hogy a kötegek csatlakozása rendben van-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a bal és a jobb oldali köteget. Ha 5 hang hallatszik, akkor a bal fék meghibásodott. Ha 3 hangjelzés hallatszik, akkor a vezérlőegység hibás.
4 hang	Hiányzik a motor jobb oldali fázisa	Ellenőrizze a motor jobb oldali kábelkötegének csatlakozását. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a motor bal és jobb oldali kábelkötegét. Ha 2 hangjelzés hallatszik, az a jobb oldali motor meghibásodását jelenti. Ha 4 hangjelzés hallatszik, akkor a vezérlőegység hibás és a jobb oldali motor fázisa hiányzik.
5 hangjelzés	Jobb fék	Ellenőrizze, hogy a fék a megfelelő helyzetbe van-e kapcsolva, és hogy a kötegek csatlakozása rendben van-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a bal és a jobb oldali kábelköteget. Ha 3 hang hallatszik, akkor a jobb oldali fék meghibásodott. Ha 5 hang hallatszik, akkor a vezérlőegység hibás.
6 hang	Túlfeszültség	Ellenőrizze, hogy a kocsit lehet-e tolni. Ha ellenállást érez, válassza le a vezérlőegységet a motorról. Ha nem lehet tolni, akkor valószínűleg a motor rövidzárlatos. Ha a kocsit lehet tolni, akkor a vezérlőegység hibás.
7 hang	Joystick	Engedje el a joystickot, és hagyja, hogy visszatérjen eredeti helyzetébe.
8 hang	Vezérlőegység	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel
9 hang	A bal oldali kódoló meghibásodása	Ellenőrizze a bal oldali motorcsomag csatlakozását. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a bal és jobb motorcsomagot. Ha 10 hangjelzés hallatszik, az a bal motor meghibásodását jelenti. Ha 9 hang hallatszik, akkor a vezérlőegység hibás.

10 hang	Jobb oldali kódoló meghibásodása	Ellenőrizze a motor jobb oldali kötegének csatlakozását. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a bal és jobb motorcsomagot. Ha 9 hangjelzés hallatszik, az a jobb motor meghibásodását jelenti. Ha 10 hangjelzés hallatszik, akkor a vezérlőegység hibás.
11 hang	Motor túlterhelés	Kapcsolja ki és indítsa újra. Győződjön meg arról, hogy a motor nem akadt el.
12 hang	Túlfeszültség	Kapcsolja ki, húzza ki és dugja be az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a vezérlőegységet vagy az akkumulátort.
13 hang	Túlmelegedés	Kapcsolja ki és hagyja kihűlni. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a vezérlőegységet.
14 hang	Kommunikációs hiba	Ellenőrizze, hogy a vezérlőegység megfelelően van-e csatlakoztatva.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- A tisztításhoz használjon enyhe tisztítószereket és nedves ruhát. Ne használjon maró hatású tisztítószereket.
- Mindig alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt, különösen az elektronikus alkatrészeket.
- A vezérlőt és a panelt tartsa távol a nedvességtől.
- Ellenőrizze a kábelek és a csatlakozások állapotát.
- A tisztításhoz ne használjon vízsugarat vagy nagynyomású tisztítókat.
- A kocsit jól szellőző helyen tárolja, korrozív gázok és 80 % alatti páratartalom mellett.

GYAKORI ELLENŐRZÉS

Rész	Minden nap	Minden héten	Havonta	Minden hónap 3	Minden hónap 6
Akkumulátor	-				
Tápegység		-			
Akkumulátor csatlakozó			-		
Csatlakozó kábel			-		
Váz				-	
Mozgó alkatrészek				-	
Ülés					-
Csapágyak					-
Kerekek					-
Elektromágneses fék					-

KÖRNYEZETVÉDELME

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

