



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

**IN 29201 Elektromos könnyű kerekesszék inSPORTline
Zauney**



TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
AZ ELEKTROMOS ÁRAMKÖR VÁZLATA	4
TERMÉK LEÍRÁS	4
ÖSSZESZERELÉS.....	5
VEZÉRLÉS	8
TÖLTÉS	9
AKKUMULÁTOR	9
AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	9
TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM ÉS ALÁTÁMASZTÁS VÉDELEM	10
FÉK.....	10
BIZTONSÁGI ÖV	10
VEZETÉS.....	10
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS	11
GYAKORI ELLENŐRZÉS.....	12
KÖRNYEZETVÉDELEM.....	12

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végrehajtsa termékein. Látogasson el a www.insportline.cz weboldalunkra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg azt a jövőbeni használatra.
- Hirtelen mozgás, vezérlési hiba vagy egyéb meghibásodás esetén azonnal állítsa le a tolókocsit.
- A használat megismerése érdekében mindig végezzen gyakorló utat ismerős környezetben és más személy felügyelete alatt.
- A tolókocsit a helyi előírásoknak, szabályoknak és törvényeknek megfelelően használja.
- Tartsa ujjait és végtagjait távol a mozgó alkatrészekről.
- Ne használjon kopott vagy sérült kerekesszéket.
- Ha a kerekesszéken éles szélek jelennek meg, ne használja azt.
- Ne módosítsa és ne alakítsa át a kerekesszéket. Kizárólag a kerekesszék gyártási céljának megfelelően használja.
- A kocsit csak olyan személy használhatja, aki ismeri a kezelését és a biztonságos üzemeltetését.
- Védje a kocsit fizikai sérülésektől, esésektől és ütésektől.
- Védje az akkumulátort fizikai sérülésektől, esésektől és ütésektől.
- Ha az akkumulátorból szag, füst vagy folyadék távozik, azonnal válassza le, és ha lehetséges, helyezze a kocsit gyúlékony és robbanásveszélyes tárgytól távol.
- Csak eredeti akkumulátort és töltőt használjon.
- A kerekesszéket folyamatos felügyelet mellett és gyúlékony és robbanásveszélyes tárgytól távol töltsen.
- A töltés során a kocsi nem működhet.
- Védje az elektromos alkatrészeket a víz behatolásától.
- Ne tegye ki hosszabb ideig napfénynek.
- Ha a kerekesszék nincs beindítva és nem mozog, ne mozgassa a vezérlő joystickot.
- Ne hajtson túl meredek dombokon, mert fennáll a felborulás veszélye.
- Lejtőn haladva kontrollálja a sebességet, ne gyorsítson.
- Nedves vagy csúszós úton a féktávolság megnő, és fennáll a veszélye, hogy elveszíti az irányítást a kocsi felett.
- Ne tegye ki hosszabb ideig kedvezőtlen időjárási hatásoknak.
- A kocsi egyszerre egy személy szállítására alkalmas.
- A kocsi nem vontatóeszközként készült.
- Ne húzza a kocsit egy másik jármű után.
- Fizikai korlátozottságú vagy mentális zavarokkal küzdő személyek csak felnőtt felügyelete vagy gondviselője mellett használhatják a kerekesszéket.
- Ne használja alkohol, drogok vagy az ítélőképességet és a reflexeket befolyásoló gyógyszerek hatása alatt.
- Teherbírás: 100 kg

Megjegyzés a hangjelzések vezérléséhez:

KIKAPCSOLÁS: Indítás után tartsa lenyomva a + gombot 5 másodpercig az hangjelzések

kikapcsolásához. INDÍTÁS: Indítás után tartsa lenyomva a + gombot 5 másodpercig az hangjelzések bekapcsolásához.

AZ ELEKTROMOS ÁRAMKÖR VÁZLATA

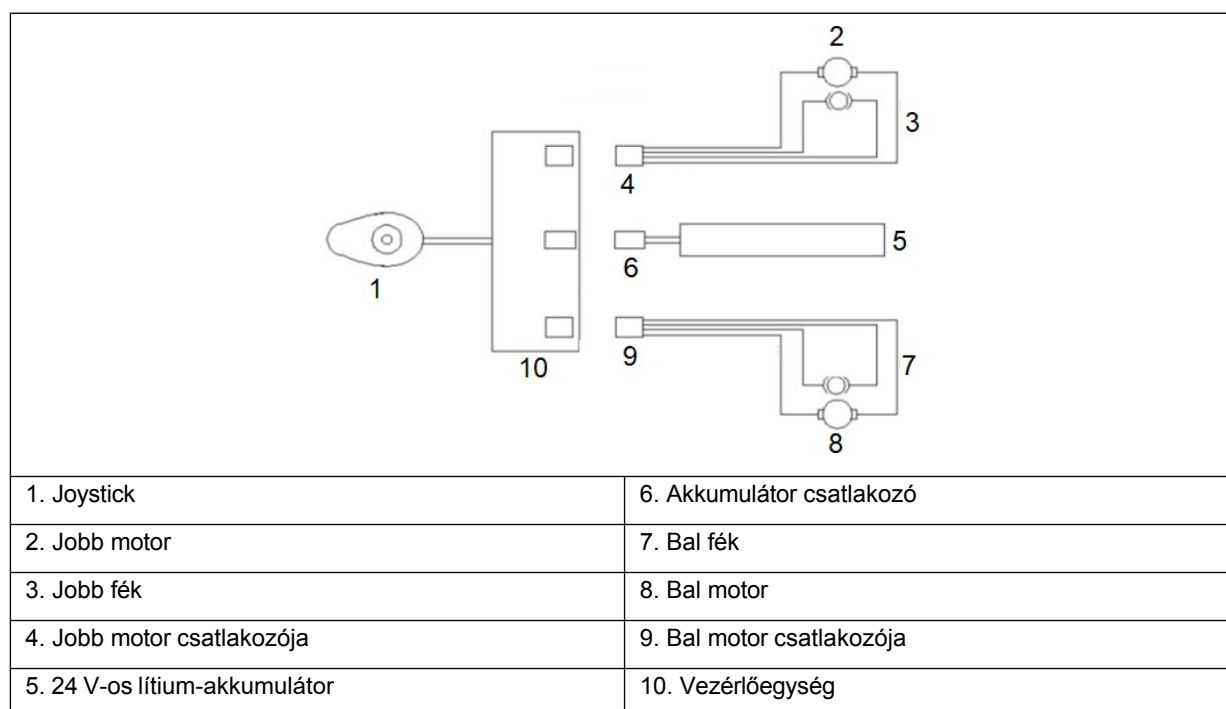

TERMÉK LEÍRÁS



ÖSSZESZERELÉS

Vegye ki a kerekesszéket a csomagolásból, és helyezze egy sík, tiszta felületre.

Lazítsa meg a háttámlát és az üléskeretet tartó hevedert (1) (1. ábra). Ezután nyissa ki a keretet (2. ábra).

Győződjön meg arról, hogy a összecsukható mechanizmus (2) csapokkal van rögzítve (3. ábra).

A kocsi kinyitása és rögzítése után csatlakoztassa a vezérlőpanelt a csat segítségével, és kösse össze a kábeleket (4. ábra).

1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra



ÖSSZESZERELÉS

Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a kocsi ki van kapcsolva.

Az egyik kezével fogja meg az ülés alatt található összecsukható mechanizmust, a másikkal pedig a háttámla keretét (5. ábra). Hajtsa össze az ülés keretét és a háttámla keretét (6. ábra).

Összecsukási eljárás és a kocsi alakja összecsukott állapotban (7. ábra). A lábtartót csukja össze utoljára (8. ábra).

5. ábra



6. ábra



7. ábra



8. ábra



A MOZGÓ RÉSZEK BEÁLLÍTÁSA

A vezérlőpanel beállítása

A vezérlőpanel távolsága teleszkópos kerettel állítható be. A kívánt hossz beállítása után a vezérlőpanelt rögzíteni kell, hogy ne mozdulhasson el.




A kartámasz felemelése

A könnyebb fel- és leszállás érdekében felemelheti a kartámaszt.



Mágneses fék

A mágneses fék karjának helyzete határozza meg, hogy a kocsit lehet-e tolni (B), vagy a kocsi meghajtással mozog (A).

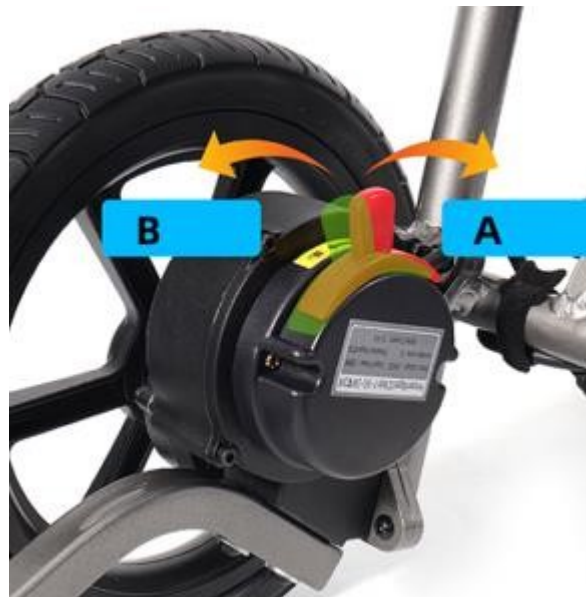

VEZÉRLÉS

	Az akkumulátor aktuális állapota
	Aktuális sebesség
	Sebességmód
	Megtett távolság
	Kapcsoló gomb
	Sebesség csökkentése
	Sebesség növelése A kocsi elindítása után a gombot 5 másodpercig lenyomva tartva be-/kikapcsolhatja a hangjelzést.
	A gomb megnyomásával be-/kikapcsolhatja a lámpákat. A gomb lenyomva tartásával bekapcsolja a dudát, amely a gomb elengedésekor kikapcsol.

Kapcsoló: A kapcsolóval indíthatja el/állíthatja le a kocsit. A kapcsoló vészhelyzetben vészleállító gombként is használható.

Joystick: A joystick segítségével irányíthatja a jármű irányát és sebességét. Minél távolabb van a joystick a középponttól, annál nagyobb a sebesség. Amint elengedi a joystickot, az visszatér eredeti helyzetébe, és a jármű megáll.

Duda: A gomb lenyomva tartásával a dudu megszólal.

Sebességbeállítási gombok: A gombokkal beállíthatja a maximális sebességet.

Ha a kocsi hirtelen elindul, vagy bármilyen vészhelyzet áll elő, azonnal engedje el a joystickot, és a kocsi megáll.

Töltés: A kocsit az eredeti töltővel töltsen. Soha ne csatlakoztasson más eszközt a töltőporthoz.

Akkumulátor: Az első használat előtt töltsen fel az akkumulátort. Az akkumulátor töltési ideje 6–8 óra. 100% akkumulátor-kapacitás kb. 5 töltési ciklus után érhető el.

Ne használja a kocsit, ha a környezeti hőmérséklet -25°C alatt vagy $+50^{\circ}\text{C}$ felett van.

Az akkumulátor paramétereit:

Típus:	Lítium akkumulátor
Méretek:	179*231,5*45 mm
Feszültség:	24 V
Kapacitás:	10 Ah*1

TÖLTÉS

Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a kocsi ki van kapcsolva. Csatlakoztassa a töltőt.

Megjelenik a töltés ikonja (1) és az akkumulátor töltöttségi állapota (2). A töltési idő 6 ~ 8 óra. Töltés után válassza le a töltőt.



AKKUMULÁTOR

6 hónapos garancia az akkumulátor élettartamára – az akkumulátor névleges kapacitása nem csökken 70 % alá a teljes kapacitásból a termék értékesítésétől számított 6 hónap alatt.

A megfelelő működés és a biztonságos használat érdekében kövesse a kézikönyvben szereplő utasításokat. Ha az akkumulátor megsérült, folyadék szivárog belőle vagy szokatlan szagot áraszt, azonnal hagyja abba a használatát.

- Az akkumulátor élettartama korlátozott. Ha a normál élettartamot meghaladó ideig használja az akkumulátort, akkor a töltési gyakoriság növekedhet és a hatótávolság csökkenhet.
- Ne nyissa ki és ne dobja a tűzbe az akkumulátort. Ne helyezzen idegen tárgyakat az akkumulátorba.
- Ne érintse meg az akkumulátort fémtárgyakkal. Az akkumulátor felrobbanhat vagy megsérülhet.
- Csak eredeti töltőt használjon.
- Vezetés közben tartsa be a helyi előírásokat és törvényeket.
- Az akkumulátort folyamatosan lehet tölteni.
- Az akkumulátor töltésének ideális hőmérséklete +10 °C és +30 °C között van.
- Ha a akkumulátort hideg környezetben használja, annak hatótávolsága csökken.

Ne javítsa és ne módosítsa a akkumulátort saját kezűleg.

INFORMÁCIÓK AZ AKKUMULÁTORRÓL

A használat után minél gyakrabban töltsse fel az akkumulátort. Az akkumulátor fokozatosan lemerül, még akkor is, ha nem használja. Ha nem használja rendszeresen a kocsit, hetente egyszer töltsse fel az akkumulátort. Csak eredeti töltőt használjon.

TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM

Ha a védelem bekapcsol, a kocsi automatikusan kikapcsolja az áramellátást. Az áramellátás visszaállításához húzza ki, majd dugja be újra az akkumulátor csatlakozóját a vezérlőpanelbe.

FÉK

Ha azt szeretné, hogy a kocsi a helyén maradjon, állítsa a féket felső helyzetbe. Ha tovább szeretne haladni, a féket alsó helyzetbe kell állítania.

BIZTONSÁGI ÖV

A vezetés során a felhasználónak biztonsági övvel kell rögzítenie magát.



Vezetés közben ne dohányozzon, tartsa távol magát a nyílt lángtól, és ne fogyasszon alkoholt vagy a ítélőképességet befolyásoló gyógyszereket.

VEZETÉS

Az első utat és a kocsi kezelését gyakorolja sík, nyílt és ismert terepen. Az első utat más személy közreműködésével és segítségével hajtsa végre.


Mielőtt felülne, győződjön meg arról, hogy a kerekszeker ki van kapcsolva. Fel- és leszálláskor ne lépjen a lábtartókra

.


Az első utazás során állítsa a sebességet a legalacsonyabb szintre. Próbálja ki az előre/hátra mozgást, majd próbálja ki a kanyarodást menet közben.



Minél távolabb van a joystick a középponttól, annál gyorsabban halad. Lassan és óvatosan tolatjon. Ha megállni szeretne, engedje el a joystickot, az automatikusan visszatér a középpontba, és a kerekszék megáll.

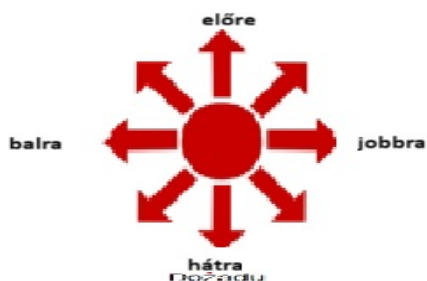

Ne hajtson át olyan akadályokon, amelyek magasabbak 3 cm-nél, szélesebbek 10 cm-nél.

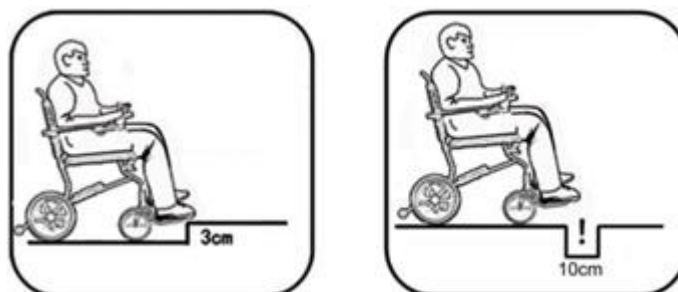

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

- A tisztításhoz használjon enyhe tisztítószereket és nedves ruhát. Ne használjon maró hatású tisztítószereket.
- Mindig alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt, különösen az elektronikus alkatrészeket.
- A vezérlőt és a panelt tartsa távol a nedvességtől.
- Ellenőrizze a kábelek és a csatlakozások állapotát.
- A tisztításhoz ne használjon vízsugarat vagy nagynyomású tisztítót.
- A kocsit jól szellőző helyen tárolja, korrozív gázok és 80% alatti páratartalom mellett. 80 %.

GYAKORI ELLENŐRZÉS

Rész	Minden nap	Heti	Havonta	Minden hónap 3	Minden hónap 6
Akkumulátor	-				
Tápegység		-			
Akkumulátor csatlakozó			-		
Összekötő kábelköteg			-		
Váz				-	
Mozgó alkatrészek				-	
Ülés					-
Csapágyak					-
Kerekek					-
Elektromágneses fék					-

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

