



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 29673 inSPORTline Thodor elektromos kerekesszékhez való pótkocsi



A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést hajtson végre termékén. Látogasson el a www.insportline.cz weboldalunkra, ahol megtalálja a kézikönyv legfrissebb verzióját.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Használat előtt ellenőrizze a termék állapotát. Győződjön meg arról, hogy egyetlen alkatrész sem sérült vagy kopott.
- Ha a terméken éles élek jelennek meg, ne használja azt.
- Ne lépje túl a megadott teherbírási értéket.
- A termék nem alkalmas állatok vagy más személyek szállítására.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a pótkocsi megfelelően van-e rögzítve.
- Mindig tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.
- Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok állapotát. Ha elhasználódtak, a következő út előtt ki kell cserélni őket.
- Ha pótkocsi van csatlakoztatva, a féktávolság megnő, ezért fokozott óvatossággal járjon el.
- A csatlakoztatott pótkocsi megváltoztathatja a jármű menetviszonyait, ezért fokozott óvatossággal járjon el.
- Teherbírás: 50 kg

ÖSSZESZERELÉS

Ellenőrizze a csomag tartalmát



A keret előkészítése

Helyezze be a védőburkolatokat a keretbe. A behelyezéshez használhat kalapácsot. Óvatosan kopogtassa be a védőburkolatokat a keretbe.



A kerekek előkészítése

Húzza át a tengelyt a keréken, és rögzítse az anyát a belső oldalán.



A kerekek rögzítése a vázra

A csapszeg segítségével rögzítse a kerék tengelyét a vázban. A csapszegnek át kell haladnia a váz és a tengely nyílásain.



A vonórúd rögzítése

Igazítsa össze a vonórúd és a váz furatait. Csavarokkal és anyákkal rögzítse őket.



Tárolórekesz

Helyezze be a tárolóteret a vázba. Helyezzen egy fedő ponyvát a tárolóterére, és rögzítse azt tépőzáras szalaggal a vázhoz.



A fényvisszaverők rögzítése

Rögzítse a fényvisszaverőket kapcsokkal a pótkocsi vázához. Állítsa be a fényvisszaverő dőlésszögét úgy, hogy a hatékonysága a lehető legnagyobb legyen.



A vonókar rögzítése a pótkocsira

Rögzítse a vonókarot a pótkocsira a rögzítőkapocs segítségével.



A rögzítés ellenőrzése



A pótkocsi rögzítése a vonókarhoz

Lazítsa meg a vonókar orrán lévő csavart. Emelje fel az orrot, és rögzítse a vonórudat a gömbhöz. Ezután rögzítse a vonórudat az orr segítségével, és húzza meg a csavart.



KÖRNYEZETVÉDELEM

A termék élettartamának lejártá után, vagy amennyiben a további javítás már gazdaságilag nem lenne célszerű, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően és környezetkímélő módon ártalmatlanítsa. Vigye a terméket a legközelebbi, erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre.

A szabályoknak megfelelő ártalmatlanítással hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, valamint segít megelőzni a környezetre, illetve az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. Ha bizonytalan, konzultáljon a helyi illetékes hatóságokkal, hogy elkerülje a szabályok megsértését és az abból eredő szankciókat.

Az elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé, hanem adja le az újrahasznosításra kijelölt helyeken.