


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 29689 Infravörös térdbandázs inSPORTline Infracor

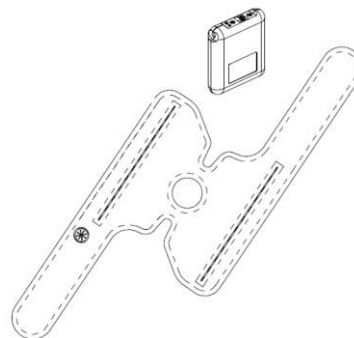


A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármilyen változtatást és fejlesztést végezzen termékein. Látogasson el weboldalunkra, a www.insportline.eu-ra, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- A termék nem alkalmas: terhes és szoptató nők, gyermekek, hő- és fényérzékeny emberek, bőrküttéssel, bőrkárosodással stb. küzdő emberek számára.
- Használat előtt konzultáljon orvosával.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne használja olyan gyógyszerekkel vagy kozmetikai termékekkel együtt, amelyek fokozzák a hő/fény iránti érzékenységet.
- Ne használja sérült vagy kopott terméket.
- Ne használja, ha a tápkábel sérült.
- Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.
- Ne javítsa és ne módosítsa a terméket saját kezűleg.
- Tartsa távol víztől, hőforrásoktól és nyílt lángtól. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A vezérlő beépített Li-ion akkumulátorral rendelkezik. Védje a vezérlőt ütésektől, leejtéstől és fizikai sérülésektől. Védje a vezérlőt víztől, hőforrásoktól és nyílt lángtól. Ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Ez nem helyettesíti az orvosi ellátást.


A CSOMAG TARTALMA

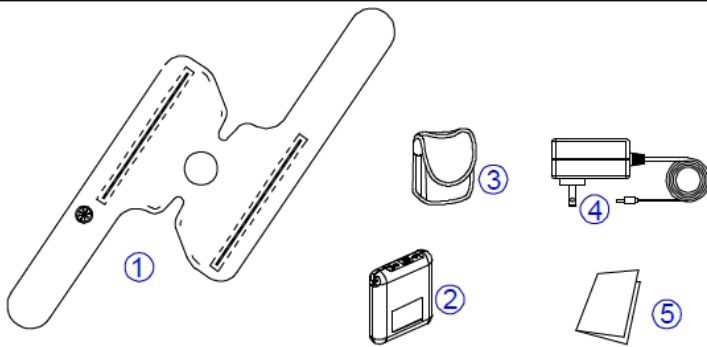	
1. Bandázs	4. Töltőadapter
2. Vezérlő	5. Kézikönyv
3. Vezérlő tok	

MÉRETEK

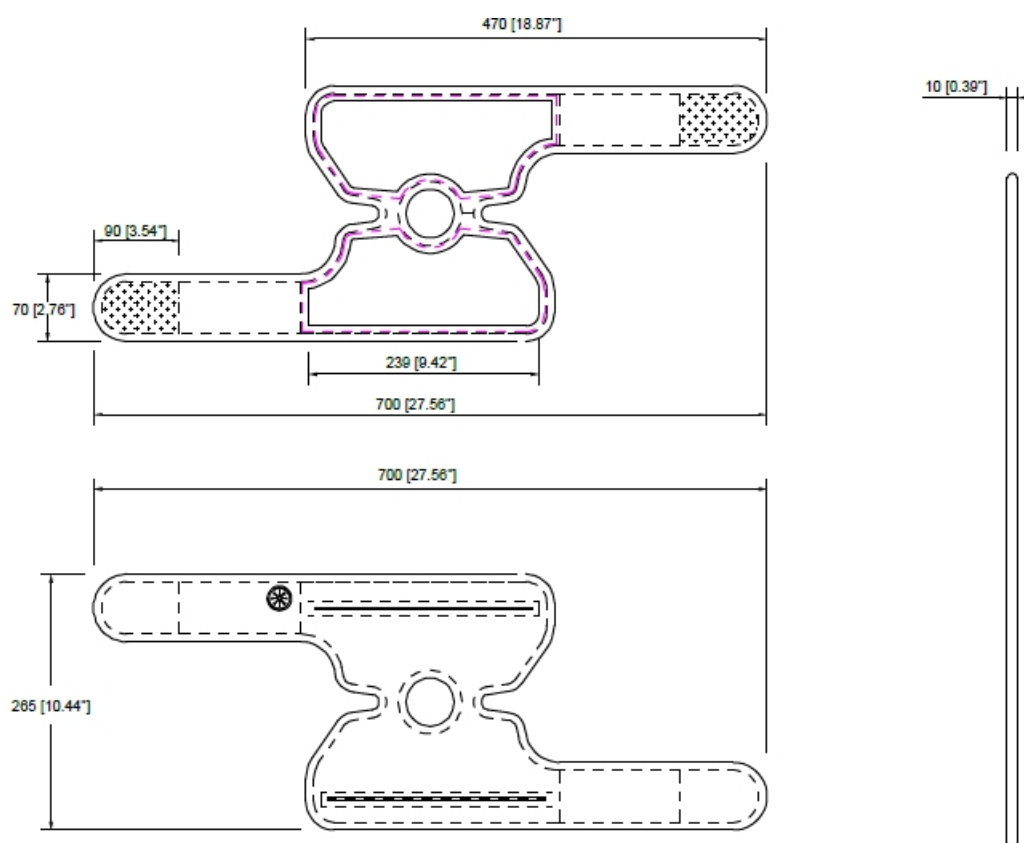

VEZÉRLŐ LEÍRÁS

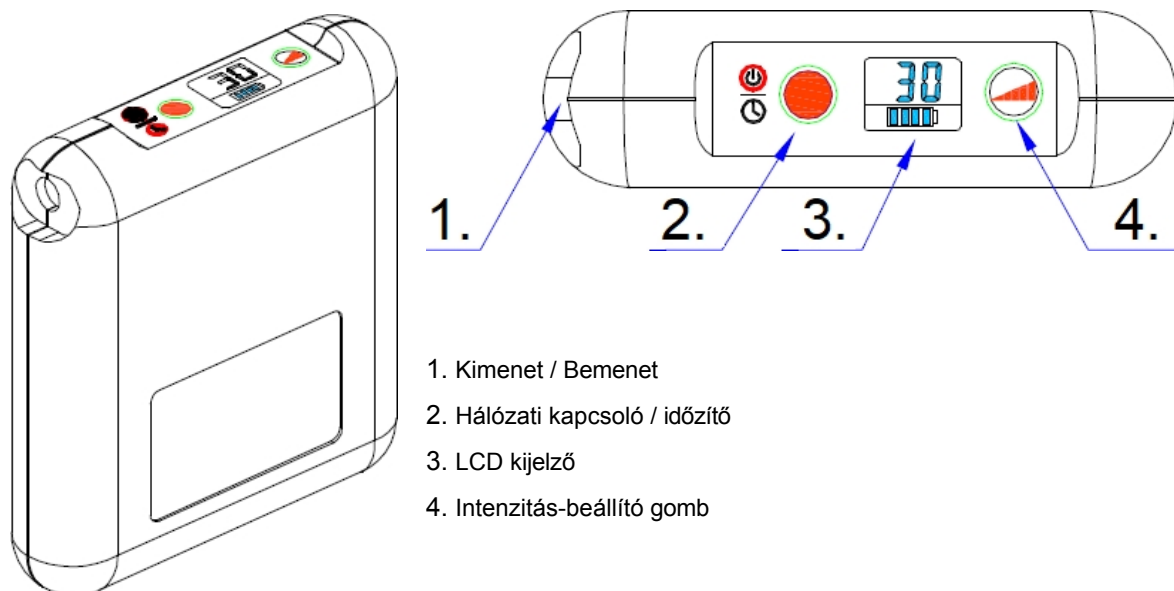

VEZÉRLŐ KIJELZŐ

Akkumulátor kapacitás		Intenzitás	
	25% kapacitás	L1	1. intenzitási szint (legalacsonyabb)
	50% kapacitás	L2	2. intenzitási szint
	75% kapacitás	L3	3. intenzitási szint
	100% kapacitás	L4	4. intenzitási szint (legmagasabb)
Időzítő			
	Beállított használati idő: 30 perc, 25 perc, ...		
	Maradék idő: 30 perc, 29 perc, 28 perc, ...		

VEZÉRLŐ

Bekapcsolás

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. A vezérlő az alapértelmezett beállításokkal indul: 30 perces időzítő, L4 intenzitás.

Az LCD kijelzőn megjelenik a hátralévő idő és az akkumulátor kapacitása. A vezérlő automatikusan kikapcsol, amikor az időzítő eléri a 0-t.

Időzítő

Bekapcsolás után a be-/kikapcsoló gomb / időzítő megnyomásával beállíthatja a működési időt. 3 másodperc inaktivitás után a működési idő mentésre kerül.

Intenzitás

Az intenzitás gomb megnyomásával beállíthatja a 4 intenzitási szint egyikét: L1 (min) – L4 (max). 3 másodperc inaktivitás után az intenzitás el lesz mentve.

Túlfeszültség védelem

A vezérlő beépített védelemmel rendelkezik a túlzott kisülés ellen. Normál használat során a vezérlő folyamatosan figyeli az akkumulátor feszültségét. Ha az akkumulátor feszültsége 9,6 V alá csökken, az akkumulátor szimbólum 3 másodpercig villog, majd a vezérlő automatikusan kikapcsol.

Túlterhelés elleni védelem


Amikor a vezérlőt a töltőkábel segítségével csatlakoztatja a töltőhöz, a vezérlő elkezd a töltést, az LCD kijelzőn a CH felirat jelenik meg, és az akkumulátor szimbólum villog. A vezérlő folyamatosan figyeli az akkumulátor feszültségét. Amint az akkumulátor feszültsége eléri a 12,6 V-ot, a töltés leáll. Eközben az akkumulátor szimbólum villogása is leáll. A töltés befejeződött.

Megjegyzés:

1. Az időzítő megváltoztatásakor a beállítások a legutóbbi értékre állnak vissza.
2. A töltés előtt a vezérlőt ki kell kapcsolni.
3. Ha a vezérlőt hosszabb ideig tárolja, és nem indul el, csatlakoztassa a töltőhöz, majd kapcsolja be a bekapcsológommbal.

HASZNÁLAT


1. Javasoljuk, hogy a bandázst ruházat nélkül, közvetlenül a bőrre helyezze.
2. Tisztítsa meg és szárítsa meg a használat helyét.
3. Rögzítse a térdhez vagy a könyökhöz tépőzáras szalaggal, hogy a bandázs szorosan, de kényelmesen rögzüljön.
4. Helyezze a vezérlőt a zsebbe, és csatlakoztassa a tápkábelhez.
5. Indítsa el a vezérlőt, és állítsa be az időzítőt és az intenzitást. A beállítás után rögzítse a zsebet a kötéshez.

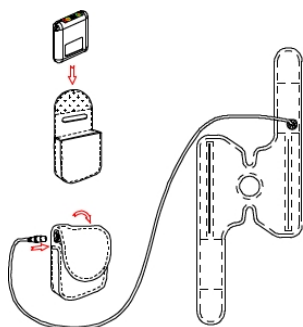

Csatlakozás



Térd

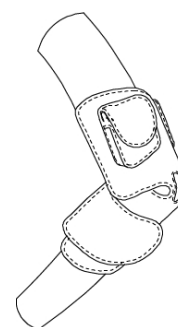

Könyök

KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt válassza le a vezérlőt a kötésről.
- Ne tegye ki a kötsést hosszabb ideig napfénynek, és védje a nedvességtől.
- A bandázst csak szappanos vízzel megnedvesített puha ruhával tisztítsa meg. A LED-panel és a vezérlőegység óvatosan eltávolítható, de mielőtt visszahelyezi a bandázst, győződjön meg arról, hogy az teljesen megszáradt.
- Ne használjon maró hatású tisztítószerket és oldószereket.
- Csak zárt tartályban tárolja.

	Ne vasalja!		Ne fehéritse
	Ne szárítsa szárítógépben		Ne vegytisztítsa

SPECIFIKÁCIÓ

Vezérlő

Töltő: Bemenet: AC100-240V, Kimenet: 12V/1A Töltési idő: 4 óra (max.)

Egy feltöltéssel használható: >10 alkalom (használati idő 30 perc, intenzitás L4)

Akkumulátor: 11,1 V / 2500 mAh

Kimeneti teljesítmény: 25 W

(max.) Méretek: H88*Sz79*M22

mm Súly: 180 g

Üzemi hőmérséklet: 0 °C és 45 °C között

Tárolási és szállítási hőmérséklet: -5 °C és 55 °C között

Üzemi páratartalom: 30% és 95% között

Tárolási és szállítási páratartalom: 20% és 85% között

Kötés

Teljesítmény: 3 W

(max.) LED

hullámhossz:

- Vörös fény (R): 660 nm
- Infravörös fény (IR): 850 nm

LED-ek száma: 64 db Méretek:

H700*Sz265*M10 mm Súly: 200 g

Üzemi hőmérséklet: 0 °C és 45 °C között

Tárolási és szállítási hőmérséklet: -5 °C és 55 °C között

Üzemi páratartalom: 30% és 95% között

Tárolási és szállítási páratartalom: 20% és 85% között

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

