



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU
IN 30614 Mechanikus összecsukskható
sport kerekesszék inSPORTline
Brenstark Lightweight



A kézikönyvben szereplő képek csak illusztrációs célt szolgálnak, a végleges termék kivitelezése enyhén eltérhet.

A SevenSport s.r.o. fenntartja a jogot, hogy termékeit előzetes értesítés nélkül módosítsa és fejlessze. Látogasson el weboldalunkra: www.insportline.eu, ahol megtalálja a kézikönyv legújabb verzióját.


TARTALOM

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
FIGYELMEZTETÉSEK.....	4
ÁLLÍTHATÓ ALKATRÉSZEK	4
Megjegyzések	6
KARBANTARTÁS	6
MŰSZAKI ADATOK.....	7
KÖRNYEZETVÉDELEM	7

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- Az utasítások és figyelmeztetések be nem tartása sérülésekhez, anyagi károkhoz vagy halálhoz vezethet.
- A kerekesszék stabilitását befolyásolja az első és hátsó kerekek állapota, valamint a felhasználó.
- Ne hajtson 10°-nál nagyobb emelkedőn vagy lejtőn.
- Ne vezessen közúton.
- Ne hajtson át akadályokon, például szegélyeken vagy résekben. A kerekesszék felborulhat.
- Ne mászzon fel a kerekesszékre.
- Ne használja a lábtartókat emelvényként. Leszálláskor győződjön meg arról, hogy a lábtartók behajtvá vannak.
- Tolóerővel történő mozgatáskor mindig a kerékfogantyúkat használja. Ne használja a gumiabroncsokat.
- Ne használjon más, nem jóváhagyott kiegészítőket vagy tartozékokat.
- A kerekesszék hőmérséklete emelkedhet, ha a kerekesszék külső hőforrásoknak (napfénynek) van kitéve.
- A kerekesszéket csak arra a célra használja, amelyre gyártották.
- Az eladó vagy a gyártó nem vállal felelősséget a kerekesszék nem megfelelő használatából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért.
- A felhasználót és a segítőt meg kell tanítani a megfelelő használatra.
- A súlypontot tartsa az ülés közepén. Mindig üljön egyenesen, és ne hajoljon előre.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes csatlakozás és állítható alkatrész szorosságát. Soha ne emelje meg a kerekesszéket az állítható alkatrészeknél fogva.
- Rendszeresen ellenőrizze a kerekesszék állapotát, ne használjon kopott vagy sérült kerekesszéket.
- Akadályokon való áthaladáskor ügyeljen arra, hogy a kerekesszék ne boruljon fel. Soha ne hagyja, hogy a kerekesszék saját súlya alatt összerogyjon.
- Lift használata esetén figyeljen a teherbírásra és a lift típusára.
- Ne emelje meg a kerekesszéket, ha valaki ül benne. Sérülésveszély áll fenn.
- Ha szükséges egy személyt a kerekesszékből egy másik felületre áttétetni, próbálja meg a lehető legkisebbre csökkenteni a két hely közötti távolságot.
- Amikor egy személyt áthelyez a kerekesszékből, ne felejtse el megfelelően rögzíteni a kerekesszéket.
- Tartsa távol a végtagokat és testrészeket a mozgó alkatrészekről.
- A kerekesszék egy személy szállítására alkalmas.
- Javítást, karbantartást vagy tisztítást csak akkor végezzen, ha a kerekesszék üres.
- Ne húzza meg túlzottan az állítható alkatrészeket és csatlakozásokat. Ez károsíthatja a vázat és a menetek.
- Az állítható alkatrészeket szerszámok használata nélkül kell tudni beállítani.
- Javításhoz csak azonos eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Ha a kerekesszéken éles élek jelennek meg, azonnal hagyja abba a kerekesszék használatát, amíg a sérülés meg nem javításra kerül.
- Teherbírás: 100 kg


FIGYELMEZTETÉSEK

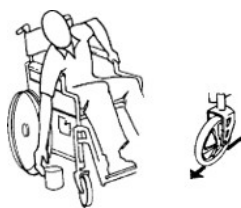

Ne hajoljon a kocsi szélére, ha nem szükséges. Szükség esetén rögzítse a kerekeket.



Ne dőljön hátra, mert megváltozhat a súlypontja és felborulhat.

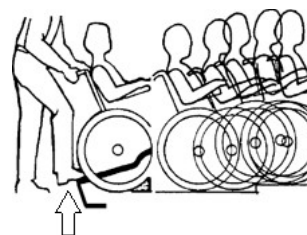

Akadályokon történő áthajtásakor a kerekesszék vázára lépve döntse meg azt.

ÁLLÍTHATÓ ALKATRÉSZEK

A hátsó kerekek eltávolításához vagy felszereléséhez nyomja meg a hátsó keréktengely végét.



Az imbuszkulccsal állítsa be a hátsó biztonsági kerekek magasságát. Az állítás után húzza meg a csavarokat.



A középső keret helyzetének megváltoztatásához lazítsa meg az imbuszcsavarokat, és mozgassa a keretet. A beállítás után húzza meg a csavarokat.



A lábtartó szögét a lábtartón található csavarokkal állíthatja be. A beállítás után húzza meg a csavarokat.



A lábtartó magasságát a lábtartó keretén található csavarokkal állíthatja be. A beállítás után húzza meg a csavarokat.



A tolófogantyúk helyzetét a csatok segítségével állíthatja be.



A biztonsági kerekek helyzetét előre/hátra a csatok segítségével állíthatja be.



Beállíthatja a fék pozícióját előre/hátra a csatok segítségével.




Megjegyzések

Használat előtt ellenőrizze a biztonsági kerekek helyzetét. Állítsa be őket úgy, hogy ne akadályozzák a mozgást tolás közben.



Mindig használjon biztonsági övet.

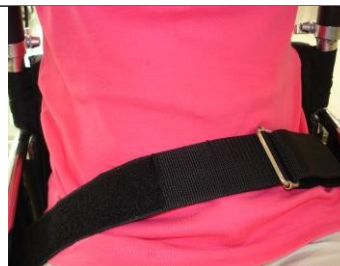

Ellenőrizze az állítható alkatrészek biztonságát.



KARBANTARTÁS

- A tisztításhoz csak enyhe tisztítószeret és langyos vizet használjon. Ezután alaposan szárítsa meg. Ne használjon maró hatású tisztítószeret, fehérítőket stb.
- Tartsa tisztán a kerekeket. A szennyeződés lelassíthatja vagy teljesen megakadályozhatja mozgásukat.
- Rendszeresen kenje meg az összes mozgó alkatrészt.
- A homok, a sós víz vagy a só károsíthatja a fém alkatrészeket, a csapágyakat és más mozgó alkatrészeket, és korróziót okozhat a fém alkatrészekben.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes mozgó csatlakozás állapotát, és szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

TECHNIKAI ADATOK

Kerekesszék alkatrész	Méret
Teljes hossz	85 cm
Teljes szélesség	58 cm
Teljes magasság	80 cm
Kinyitott szélesség	35 cm
Összecsukott szélesség	36 cm
Ülésmélység	36 cm
Ülés magassága a talajtól	48 cm
Lábtartó magassága a talajtól	5-10 cm
Háttámla magassága	27 cm
Első kerék átmérője	10 cm
Hátsó kerék átmérője	60 cm
Max. teherbírás	100 kg
Nettó súly	10 kg

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. Ezáltal megóvjaa a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvénszegést vagy a szankciókat. Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.

