



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - HU
IN 23304 Önmelegítő deréköv inSPORTline Avochi

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg, ha később szüksége lenne rá. Tartson be minden figyelmeztetést és óvintézkedést, hogy elkerülje a károsodást vagy sérülést.
- Csak ennek a kézikönyvnek megfelelően használja a terméket. A nem megfelelő használat súlyos sérülést vagy a termék tönkremenetelét okozhatja. Ne végezzen nem megfelelő módosításokat ezen az övön.
- Csak eredeti (szállított) tartozékokat és eredeti alkatrészeket használjon.
- Soha ne használja alvás közben vagy csökkent érzékenységgel.
- Ne használja folyamatosan 2 óránál hosszabb ideig.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Ez nem játék. Ez a termék csak felnőtt felhasználók számára készült.
- Egészségügyi betegségekben szenvedők (bénulás, hőérzékenység stb.) nem használhatják. Ez a termék nem alkalmas várandós nők és cukorbetegék számára.
- Nem alkalmas nehezen alvó vagy zavarodott emberek számára.
- Soha ne használja gyúlékony anyagokkal és gázokkal vagy oxigénraktárban.
- Ne nyomja meg, ne nyomja össze, és ne üljön rá a termékre.
- Használat vagy csomagolás közben ne hajtsa össze vagy csavarja ki.
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne használjon tűt vagy más fém alkatrészeket.
- Soha ne húzza ki hirtelen a kábelt a konnektorból. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy kopott-e a termék. Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket.
- A termék használatának megkezdése előtt konzultáljon kezelőorvosával. Ha a használat során egészségügyi szövődményeket vagy szédülést észlel, azonnal hagyja abba.
- Ez a termék nem alkalmas akut sérülésben, vérzékenységben vagy ödémában szenvedők számára.
- Soha ne üljön vagy feküdjön rá, és ne nyomja meg erősen ezt a terméket.
- Soha ne használjon szigetelőanyagot ennek az övnek a lefedésére, amíg az elektromosan működik.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze bőre állapotát.
- Csak megfelelő áramforrást használjon. Egy rossz áramforrás káros lehet a tápellátás különbsége miatt.
- Ez a termék nem rendelkezik terápiás minősítéssel, és használata nem helyettesíti a professzionális orvosi ellátást.

KARBANTARTÁS



Kézzel mosható




Mossa 30°C-on vagy alacsonyabb °C-on



Nem vasalható



Ne használjon fehérítőt

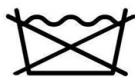

Ne mossa ki



Ne tisztítsa szárazon



Fellógatva szárítsa



Ne csavarja ki

MÉRETTÁBLÁZAT

Méret	Magasság	Hosszúság	Derékbőség
M	22 cm	90 cm	70-85 cm
L	22 cm	100 cm	80-95 cm
XL	22 cm	110 cm	90-105 cm
XXL	22 cm	120 cm	100-115 cm

HASZNÁLAT

- Helyezze az övet kényelmesen a derekára.
- Önmelegedő mágnesek: Télen törölje le vízzel a fűtőelemeket.
- Ha égő érzést kezd érezni, azonnal hagyja abba a termék használatát.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.