

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

A használatától függetlenül sem a gyártó, sem a kereskedő nem felelős a törvények megsértéséért, például az ittas vezetésért.

Az eredmények tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak kritériumként különböző tevékenységek engedélyezéséhez.

2x AAA alkáli elemmel működik.


A legpontosabb mérés érdekében javasoljuk, hogy az egyes vizsgálatok között 3 percen belül 2-3 alkalommal végezze el a tesztet.

**Tartomány:** 0,00-0,19% BAC és 0,0-1,9 g / l

Végezze el a tesztet legalább 20 perccel az alkoholfogyasztás után.

A vizsgálat előtt 20 percig ne egyen és ne dohányozzon.


### 23792-1 Alkoholszonda W-TEC Spiriter

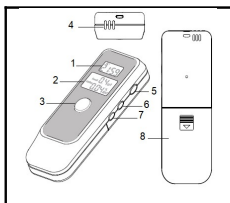


1.	LCD időkijelző
2.	Érték kijelzés
3.	Bekapcsológomb
4.	Fúvóka
5.	Mód választó gomb
6.	Beállítások gomb
7.	Beállítás gomb
8.	Az akkumulátor helye

#### AKKUMULÁTOR ELHELYEZÉSE

Távolítsa el az elemtartó fedelét.

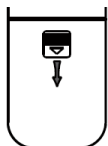

Helyezzen be 2 db AAA alkáli elemet.

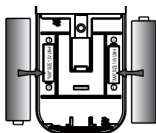


Csukja be az elemtartó fedelét.

#### HASZNÁLAT

Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A kijelző világitani fog és hangjelzés hallható.

Megjelenik a "Bemelegítés" és a visszaszámlálás 10-től 0-ig. Ha a szonda hosszabb ideig nem működött, az érzékelő szennyezett lehet, szükség esetén kapcsolja ki többször a készüléket.

Amikor a készülék készen áll, megjelenik a "Blow" (fújás) felirat és egy 10-től 00-ig tartó visszaszámlálás.

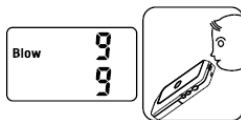

Vegyen egy mély lélegzetet, és lélegezzen folyamatosan a készülékbe 3-5 másodpercig.

Megjelenik az eredmény: 0,02 BAC (0,2 g / l) és 0,05% BAC (0,5 g / l) között „Vigyázat” felirat jelenik meg a kijelzőn.

0,05% BAC-tól (0,5 g / l) „Veszély” felirat jelenik meg a kijelzőn.



Az érték mérése és az eredmény megjelenítése után a teszter 10 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

Ha a készülék „bemelegítése” nem terhelhető, a teszter automatikusan kikapcsol, és újra kell indítani.

Ha a készüléket a használatra kész 10 másodpercen belül nem használják, a kijelzőn 0 szám látható 10 másodpercig.

## IDŐ BEÁLLÍTÁSA



Amíg az idő látható, nyomja meg az "Adj" gombot a 12 vagy 24 órás formátum kiválasztásához.

Tartsa lenyomva a "Set" gombot 2 másodpercig, hogy belépjen az időbeállításba. Az LCD kijelzőn az idő villogni kezd. Nyomja meg az "Adj" gombot az idő beállításához.

Nyomja meg a "Set" gombot a perc beállításához, a percek villogni kezdenek. Nyomja meg az "Adj" gombot az érték beállításához.

## ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁSA

Az idő kijelzése közben nyomja meg a „MODE” (mód) gombot az ébresztéshez.

Nyomja meg az „Adj” gombot az ébresztés be- vagy kikapcsolásához.

Tartsa lenyomva a "Set" (beállítás) gombot 2 másodpercig a beállítás megadásához. Az óra értéke villogni kezd, nyomja meg az "Adj" gombot az érték beállításához.

Nyomja meg a "Set" gombot a perc beállításához és az "Adj" gombot az érték beállításához.

A percek beállítása után nyomja meg a "Set" (beállítás) gombot a változtatások megerősítéséhez.

## HŐMÉRSÉKLET

Nyomja meg kétszer a "Mode" gombot a hőmérsékleti formátum beállításához.

Nyomja meg az "Adj" gombot a ° C vagy ° F kiválasztásához.

## VISSZASZÁMLÁLÁS

Az idő kijelzése közben nyomja meg háromszor a "Mode" gombot.

Tartsa lenyomva a "Set" gombot 2 másodpercig, az óra értéke villogni kezd, az "Adj" gombbal állítsa be az értéket.

Nyomja meg a "Set" gombot a perc beállításához, nyomja meg az "Adj" gombot az érték beállításához.

A percek beállítása után nyomja meg a "Set" (beállítás) gombot a változtatások megerősítéséhez.

Nyomja meg az „Adj” gombot a visszaszámlálás elindításához, majd az „Adj” gombot ismétlenül a visszaszámlálás kikapcsolásához.

Ha az érték eléri a 00:00-at, hangjelzés hallható, és a visszaszámlálás újraindul.

## SPECIFIKÁCIÓK

Hatótávolság:	0,00 % - 0,19 % BAC (0,0 – 1,9 g/l)
Pontosság:	-0,01 % ~ + 0,02 % at 0,05% BAC
Tápegység:	2x 1,5V AAA alkáli elem
Üzemelési idő:	Betöltés: 10 másodperc, reakcióidő: 5 másodperc
Óra pontossága:	±2 másodperc / den
Méret:	100 x 37 x 17 mm